


**GHẾ MASSAGE TỐT NHẤT THẾ GIỚI  
MADE IN JAPAN**



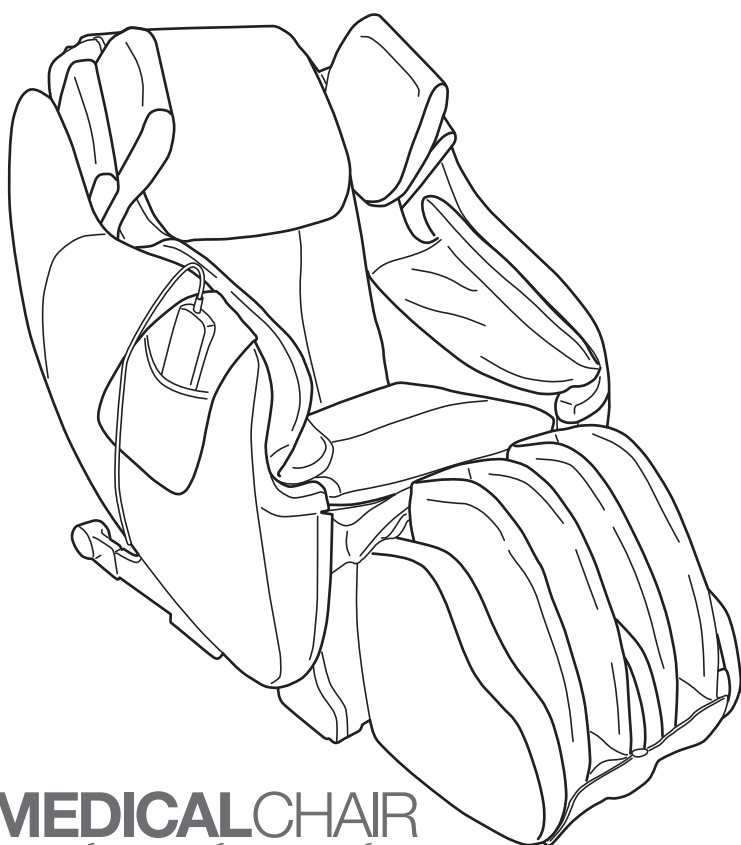

**MEDICAL CHAIR**  
Stretch & Smooth for S-Line

<b>MỤC LỤC</b>	<b>Trang</b>
■ CHỈ DẪN AN TOÀN	1
■ TÍNH NĂNG CHÍNH	4
■ CẤU TẠO VÀ MÔ TẢ	5
■ TRƯỚC KHI SỬ DỤNG	7
■ ĐIỀU CHỈNH VỊ TRÍ	12
■ SAU KHI SỬ DỤNG	14
■ CHĂM SÓC VÀ BẢO QUẢN	15
■ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MASSAGE	16
■ CHƯƠNG TRÌNH TỰ ĐỘNG	17
■ CHƯƠNG TRÌNH TỰ CHỌN	19
■ XỬ LÝ SỰ CỐ	23
■ BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG	24
■ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP	25
■ THÔNG SỐ KỸ THUẬT	27








**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  
GHẾ MASSAGE TOÀN THÂN MEDICAL CHAIR  
HCP-S878D**

# CHỈ DẪN AN TOÀN

## Các mức độ cảnh báo





 <b>Chú ý</b>	Các hoạt động có thể dẫn đến bị thương hoặc chết người.
 <b>Cảnh báo</b>	Hoạt động này có thể gây bị thương hoặc thiệt hại.




## Các biểu tượng và ý nghĩa


 Cấm	 Không tháo rời
 Không cầm khi tay ướt	 Không sử dụng nơi mà ghế massage có thể bị ướt
 Không sử dụng trong phòng tắm	
 Các hoạt động được yêu cầu	 Rút phích cắm nguồn từ ổ cắm trên tường




\*Nhớ cất giữ hướng dẫn sử dụng này ở nơi dễ lấy.

## Chỉ dẫn an toàn lắp đặt



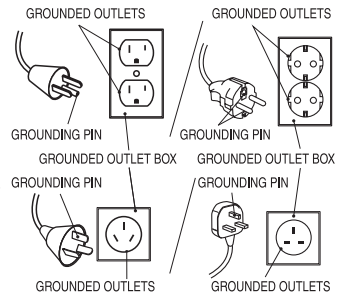


 <b>Cảnh báo</b>	
 Không lắp đặt ghế massage ở nơi có độ ẩm cao như phòng tắm hay phòng xông hơi. - Có thể dẫn đến sốc điện hoặc phá hủy ghế massage.	 Không nối dây nguôi vào ống gas, ống nước, dây điện thoại, cột thu lôi.
 Chỉ lắp đặt ở nơi có bề mặt bằng phẳng. - Ghế massage có thể gây tai nạn nếu đặt ở nơi có bề mặt không bằng phẳng.	

 <b>Chú ý</b>	
 Điện thế tiếp đất	<p><b>● Yêu cầu về không gian</b></p> <p>Sản phẩm này phải được nối đất. Nếu gặp sự cố hoặc hư hỏng, dây trung hòa được nối đất sẽ cung cấp một điện kháng cho dòng điện để giảm nguy cơ bị điện giật. Bộ nối đất gồm một dây dẫn tiếp đất và một ổ cắm nối đất. Các phích cắm phải được cắm vào một ổ cắm thích hợp đã được lắp đặt đúng cách và tiếp đất phù hợp với mạng điện địa phương và pháp lệnh quốc gia.</p> <p>* Việc nối đất không đúng có thể gây ra sốc điện. Kiểm tra chất lượng với kĩ thuật viên hoặc nhân viên dịch vụ nếu bạn có nghi ngờ việc liệu chắc chắn ghế massage của bạn đã được nối đất đúng hay chưa. Không tự sửa đổi phích cắm với ghế massage nếu nó không vừa với ổ cắm nguồn, việc này phải được lắp đặt bởi thợ điện được chứng nhận. Sản phẩm được thông thường sẽ dùng nguồn điện xoay chiều AC và có dây nối đất được lắp đặt như hình bên phải. Đảm bảo rằng sản phẩm được kết nối với ổ cắm có cấu hình như bên phải. Sản phẩm không cần dùng bộ đổi nguồn.</p>
 Các yêu cầu	<p>● Rút phích cắm nguồn sau khi sử dụng hoặc trước khi làm sạch.</p>






 <b>Cảnh báo</b>	
 Nghiêm cấm	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Không hoạt động dưới chân hoặc gối. Nhiệt quá mức có thể là nguyên nhân gây ra cháy, sốc điện, hoặc làm người bị thương.</li> <li>● Chỉ sử dụng thiết bị với mục đích nêu trong hướng dẫn sử dụng này. Không sử dụng với các mục đích kèm theo không được khuyến cáo bởi nhà sản xuất.</li> <li>● Không vận hành thiết bị nếu dây nguồn hoặc ổ cắm bị hỏng, nếu nó không hoạt động tốt như bị rơi hoặc hư hỏng hoặc bị rơi vào nước. Mang thiết bị đến trung tâm bảo hành và sửa chữa để được hỗ trợ.</li> <li>● Không kéo dây nguồn hoặc cắm dây cắm bằng tay.</li> <li>● Giữ cho van khí thông thoáng, không cho xơ vải và tóc rơi vào.</li> <li>● Không làm rơi hoặc đặt vật gì vào trong ghế khi ghế đang hoạt động.</li> <li>● Không sử dụng ghế massage ở ngoài trời.</li> <li>● Không hoạt động ở nơi đang sơn (phục) có thể gây thiếu oxy.</li> <li>● Trẻ em không được chơi với ghế.</li> <li>● Có thể dẫn tới tai nạn hoặc bị thương.</li> </ul>
 Các yêu cầu	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Rút phích cắm khỏi ổ điện khi không sử dụng hoặc khi lắp vào hoặc tháo ra một phần của ghế.</li> <li>● Cần giám sát khi thiết bị được sử dụng hoặc hoạt động gần trẻ em, thương binh hay người tàn tật.</li> <li>● Bảo quản dây điện xa bề mặt nhiệt.</li> <li>● Để ngắt kết nối, tắt công tắc nguồn trên bảng điều khiển, sau đó rút phích cắm ra khỏi ổ cắm.</li> <li>● Giữ trẻ em tránh xa khỏi phạm vi massage chân (hoặc các phần khác tương tự).</li> <li>● Kết nối thiết bị này với một ổ cắm tiếp đất duy nhất. Xem hướng dẫn nối đất.</li> <li>● Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và người có sức khỏe kém, thần kinh không ổn định, người khuyết tật, người thiếu kinh nghiệm và kiến thức cần được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng một cách an toàn và hiểu được những tác hại nguy hiểm nếu không sử dụng đúng cách nếu không có thể gây ra tai nạn hoặc bị thương.</li> </ul>

## Cảnh báo an toàn: Trước khi sử dụng

 <b>Lưu ý</b>					
 Nghiêm cấm	<ul style="list-style-type: none"> <li>Những người sau đây không được sử dụng ghế massage:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Những người đã được bác sĩ chỉ định rằng tránh các phương pháp massage vật lý trị liệu như Huyết khối tĩnh mạch sâu, phình mạch máu não hoặc giãn tĩnh mạch cấp hoặc viêm da, nhiễm trùng da bao gồm cả viêm hạ bì da.</li> <li>Người có nghi ngờ bị bong gân cổ cấp tính (chấn thương cổ).</li> </ul> </li> <li>Không sử dụng ghế với bất kỳ nguồn cấp điện nào lớn hơn thông số ở bảng bên phải.                             <table border="1" data-bbox="1161 421 1465 474"> <thead> <tr> <th>Model</th> <th>Điện áp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HCP-S878D</td> <td>220-240V ~</td> </tr> </tbody> </table> </li> <li>Có thể dẫn đến cháy nổ hoặc chập điện.</li> <li>Không sử dụng thiết bị với bất kỳ một loại máy biến áp nào.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Có thể dẫn đến hỏng ghế hoặc điện giật.</li> </ul> </li> <li>Không sử dụng ghế nếu dây nguồn hoặc phích cắm bị hỏng hoặc nếu ổ cắm trên tường bị lỏng lẻo.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Có thể gây sốc điện, ngắn mạch hoặc cháy máy.</li> </ul> </li> <li>Trước mỗi lần sử dụng, kiểm tra các phần lỗ hoặc vết nứt ở vỏ bọc ghế. Ngoài ra khi kiểm tra các phần khác của ghế nếu có vết nứt cần liên hệ với Trung tâm bảo hành Maxcare để có được sự giúp đỡ. Không được sử dụng ghế khi trên bề mặt ghế có vết nứt, vết hở vì có thể gây ra thương tích hoặc giật điện.</li> </ul>	Model	Điện áp	HCP-S878D	220-240V ~
Model	Điện áp				
HCP-S878D	220-240V ~				
 Các yêu cầu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Người có một trong những điều kiện dưới đây nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng ghế:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Có bệnh tim nặng.</li> <li>Suy giảm cảm giác gây ra do rối loạn tuần hoàn ngoại vi nghiêm trọng do bệnh tiểu đường và các bệnh khác.</li> <li>Người đang điều trị các chấn thương cá nhân.</li> <li>Loãng xương, gãy xương cột sống, đau hoặc có các triệu chứng cấp tính đó.</li> <li>Sốt cao 38 độ hoặc cao hơn như bị bệnh viêm cấp tính gây ra mệt mỏi, ớn lạnh, huyết áp không ổn định hoặc suy nhược cơ thể.</li> <li>Người đang trong giai đoạn đầu của thai kỳ hoặc ngay sau khi sinh.</li> <li>Cột sống cong hoặc bất thường.</li> <li>Người có khối u ác tính.</li> <li>Người đang có thiết bị điện tử trong cơ thể dễ bị gây nhiễu loạn ví dụ như máy tạo nhịp tim.</li> <li>Người có mục đích sử dụng ghế để điều trị hoặc cho các mục đích phục hồi chức năng.</li> <li>Người bị buộc nghỉ ngơi tại giường.</li> <li>Người có bệnh dạ dày - ruột cấp tính hoặc các bệnh như viêm dạ dày, viêm ruột, viêm gan cấp tính.</li> <li>Người đang nhận sự chăm sóc đặc biệt của bác sĩ, hoặc những người không bình thường về thể chất.</li> <li>Rối loạn chức năng khớp do thấp khớp, bệnh gout hay bệnh khác.</li> <li>Người có triệu chứng như lo âu, chóng mặt, ù tai.</li> <li>Người bị căng đau cột sống hoặc nghi ngờ bị bệnh.</li> <li>Viêm do bong gân, căng cơ hoặc các tổn thương khác.</li> <li>Người bị mất cảm giác.</li> </ul> </li> <li>Người cao tuổi và những người có xương yếu nên tìm tư vấn y tế trước khi sử dụng ghế, ngay cả khi họ không có một căn bệnh cụ thể nào.</li> <li>Nếu tình trạng không được cải thiện sau khi dùng, tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia.</li> </ul>				
 Nghiêm cấm	<ul style="list-style-type: none"> <li>Không sử dụng ghế với bất kỳ cách nào không được miêu tả trong hướng dẫn sử dụng này.</li> <li>Không sử dụng ghế này cùng các thiết bị trị liệu khác hoặc chần điện.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Có thể gây thương tích hoặc có ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe.</li> </ul> </li> <li>Không di chuyển ghế khi có người đang ngồi bên trên.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Tai nạn hoặc thương tích có thể xảy ra nếu ngồi lên ghế khi di chuyển.</li> </ul> </li> <li>Không ngồi lên ghế khi phần chân đang được nâng lên.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Bất kỳ tác động đột ngột trên phần massage chân có thể gây hỏng ghế. Ngoài ra, có thể gây tai nạn, thương tích khi không thực hiện lời khuyên.</li> </ul> </li> <li>Không sử dụng ghế với bất kỳ một phụ kiện đi kèm nào không được cung cấp từ nhà sản xuất.</li> </ul>				
 Các yêu cầu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trước khi cắm dây nguồn vào ổ cắm trên tường, hãy chắc chắn rằng ghế đã được chuyển sang chế độ OFF.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Có thể dẫn đến thiệt hại cho chiếc ghế hoặc điện giật.</li> </ul> </li> <li>Hãy chắc chắn rằng các phích cắm trên dây điện lấp đầy đủ vào dây và ổ cắm trên tường.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Có thể dẫn đến sốc điện, ngắn mạch, hoặc cháy nổ.</li> </ul> </li> <li>Trước khi sử dụng ghế lần đầu tiên, bật và chuyển đổi tất cả các chế độ theo hướng dẫn sử dụng để kiểm tra hoạt động của ghế massage.</li> <li>Trước khi sử dụng, nâng cao ghế ngã vào vị trí hoàn toàn thẳng đứng. Sau đó, dựa ngửa ghế sau chậm rãi để thoải mái nhất, nên bắt đầu với chế độ massage nhẹ nhàng hơn.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Bắt đầu với một massage sâu có thể làm tổn thương người dùng. Người cao tuổi và những người có xương yếu nên đặc biệt cẩn thận khi lựa chọn cường độ massage.</li> </ul> </li> <li>Để an toàn, ngồi xuống chiếc ghế từ từ không chuyển hoặc vận người để đảm bảo rằng các con lăn ghế được đặt ở hai bên của cột sống. Không ngồi, đứng, hoặc dựa trên phần massage chân, trừ khi bạn đang ngồi hoặc đứng dậy khỏi ghế.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Có thể gây hỏng và nguy hiểm nếu không nghe lời khuyên phía trên.</li> </ul> </li> </ul> <p>Nếu bạn sử dụng ghế sau một thời gian dài không sử dụng, đọc lại kĩ hướng dẫn sử dụng để kiểm tra xem ghế có hoạt động đúng hay không.</p>				

## Cảnh báo an toàn: Trong khi sử dụng

 <b>Cảnh báo</b>	
 Nghiêm cấm	<ul style="list-style-type: none"> <li>Không quấn dây điện hoặc dây điều khiển trên cơ thể của bạn, hoặc đặt các ghế trên của một các dây điện, dây điều khiển.</li> <li>Không cào, làm gãy, hỏng, xoắn quá mức, kéo dài hoặc uốn cong dây điện hoặc dây điều khiển.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Dây điện có thể bị hỏng, cháy hoặc chập điện.</li> </ul> </li> <li>Không đổ nước và các chất lỏng khác lên ghế hoặc điều khiển.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Có thể dẫn đến sốc điện, ngắn mạch, hoặc hỏa hoạn.</li> </ul> </li> <li>Giữ trẻ em hoặc vật nuôi ra xa khỏi vùng hoạt động của ghế massage đặc biệt là phía sau của phần lưng, dưới chỗ ghế ngồi hoặc dưới phần massage chân.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Có thể dẫn đến tai nạn hay chấn thương.</li> </ul> </li> <li>Không sử dụng ghế khi có nhiều hơn 1 người ở trên ghế. Đặc biệt, không sử dụng ghế trong khi đang giữ trẻ em.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Có thể gây nên tổn thương hoặc tai nạn.</li> </ul> </li> <li>Không sử dụng ghế trong khi cơ thể của bạn bị ướt, hoặc bằng tay ướt.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Có thể gây điện giật hoặc hỏng ghế.</li> </ul> </li> <li>Không sử dụng ghế nếu bọc bị rách nát. Nếu có, hãy rút dây nguồn ra khỏi ổ cắm trên tường.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Có thể dẫn đến một tai nạn, thương tích hoặc điện giật. Đối với việc sửa chữa. Vui lòng liên hệ trung tâm bảo hành Maxcare để được trợ giúp.</li> </ul> </li> <li>Không thả bất ngờ trong khi nâng phần chân bằng tay.</li> </ul>
 Các yêu cầu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hãy chắc chắn rằng không có người, đặc biệt là trẻ em hoặc thú nuôi, ở đằng sau khi ghế hạ thấp hoặc nâng cao phần lưng.</li> <li>Hãy cẩn thận người hoặc vật không bị kẹt đằng sau ghế hoặc dưới phần massage chân.</li> </ul>

# CẢNH BÁO AN TOÀN

## Cảnh báo an toàn: Trong khi sử dụng



Lưu ý

 Nghiêm cấm	<ul style="list-style-type: none"><li>● Không sử dụng ghế khi không mặc quần áo.</li><li>● Không sử dụng ghế cho các mục đích khác ngoài massage, hoặc mục đích khác mục đích sử dụng thông thường của ghế. - Có thể dẫn đến tai nạn hay chấn thương.</li><li>● Không sử dụng ghế massage để massage đầu, ngực, bụng hoặc khớp (đầu gối, khuỷu tay),... - Có thể dẫn đến buồn nôn hoặc chấn thương. Đặt một chiếc khăn mềm mại phía sau cổ của bạn nếu bạn muốn tránh tác động đến khu vực này.</li><li>● Không được đặt bàn tay hay bàn chân của bạn bên trong trục con lăn, vào không gian giữa lưng và mông hoặc các bộ phận chuyển động.</li><li>● Không ngồi vào ghế khi mang các vật cứng, như kẹp tóc, dây chuyền, đồng hồ, vòng tay hoặc nhẫn. - Có thể làm bị thương người sử dụng.</li><li>● Không đặt vật nào khác ngoài chân và bàn chân lên phần massage chân. - Có thể làm bị thương người sử dụng.</li><li>● Không vận hành ghế massage hoặc để nó hoạt động khi không có người sử dụng. - Có thể dẫn đến tai nạn hay chấn thương.</li></ul>
 Các yêu cầu	<ul style="list-style-type: none"><li>● Trong trường hợp có bất kỳ bất thường nào, nhấn nút EMERGENCY STOP trên bảng điều khiển để dừng hoạt động ngay lập tức.</li><li>● Nếu bạn có cơn đau cấp tính hay khó chịu về thể chất bất thường khác trong khi sử dụng ghế, ngay lập tức ngưng sử dụng ghế và tìm tư vấn bác sĩ.</li><li>● Nếu bạn massage quá mạnh, hãy giảm cường độ theo hướng dẫn sử dụng này, nếu vấn đề không được giải quyết, hãy ngừng sử dụng sản phẩm và liên hệ ngay với nhà cung cấp. - Có thể dẫn đến chấn thương nếu bạn tiếp tục sử dụng với kích thích cao trong những trường hợp như vậy.</li><li>● Không sử dụng ghế nếu không có tấm phủ lưng. - Có thể làm bị thương người sử dụng.</li><li>● Không nên ngủ quên trên ghế massage. - Có thể làm bị thương người sử dụng.</li><li>● Không nên lựa chọn bài massage dài hơn 15 phút. Không nên massage quá 5 phút một điểm trên một bộ phận trên cơ thể. - Nếu tiếp tục sử dụng trong một thời gian dài có thể dẫn tới hiệu quả không mong muốn hoặc gây bị thương.</li><li>- Tổng thời gian massage mỗi ngày không nên vượt quá 30 phút, giữ một khoảng thời gian thích hợp giữa mỗi lần massage.</li><li>● Nếu chân hoặc bàn chân bị di chuyển ra ngoài trong quá trình massage, không nên cố gắng cho vào. - Cố gắng đưa chân hoặc bàn chân vào có thể gây hại cho máy móc.</li><li>● Nếu tay hoặc cẳng tay của bạn bị di chuyển ra ngoài trong quá trình massage, không nên cố gắng cho vào. - Cố gắng tay hoặc cẳng tay vào có thể gây hại cho máy móc.</li><li>● Nếu thiết bị đã được làm nóng bề mặt, người nhạy cảm với nhiệt cần cẩn thận khi sử dụng.</li></ul>
 Rút phích cắm	<ul style="list-style-type: none"><li>● Nếu điện bị ngắt hoặc sắp ngắt, dừng sử dụng ghế ngay lập tức và ấn nút Power về chế độ OFF. Rút phích cắm điện ra khỏi ổ điện. - Tai nạn hoặc tổn thương có thể xảy ra nếu ghế lại tiếp tục chế độ hoạt động khi nguồn bật lại.</li><li>● Nếu có sét, dừng sử dụng ghế ngay lập tức và ấn nút Power về chế độ OFF. Rút phích cắm điện ra khỏi ổ điện.</li><li>● Nếu ghế không hoạt động hoặc có bất kỳ sự cố, tốt nhất nên dừng sử dụng ghế, ấn nút Power về chế độ OFF, rút phích cắm điện ra khỏi ổ điện và liên hệ với nhà cung cấp để được hỗ trợ và sửa chữa. - Sốc điện hoặc cháy có thể xảy ra bởi ngắn mạch nếu ghế được cắm điện trong các trường hợp như vậy.</li></ul>

## Cảnh báo an toàn: Sau khi sử dụng hoặc khi không sử dụng



Lưu ý

 Nghiêm cấm	<ul style="list-style-type: none"><li>● Hãy chắc chắn rằng nguồn điện đã được tắt sau mỗi lần sử dụng và rút phích cắm điện. - Có thể xảy ra tai nạn hoặc thương tích nếu như có trẻ em và thú nuôi chơi với ghế.</li><li>● Không sử dụng dây nguồn cho bất kỳ một sản phẩm nào khác.</li><li>● Sau khi sử dụng ghế, hãy chắc chắn rằng phần lưng ghế đã được đưa đến vị trí thẳng nhất và phần chân được hạ xuống vị trí thấp nhất.</li><li>● Lau ghế sau mỗi lần sử dụng và không đặt ghế ở nơi có độ ẩm thấp.</li><li>● Không đặt bất kỳ vật nào lên ghế.</li><li>● Không nên để trẻ em làm sạch và bảo trì máy nếu không có người giám sát. - Có thể xảy ra tai nạn hoặc thương tích.</li></ul>
 Rút phích cắm	<ul style="list-style-type: none"><li>● Giữ dây nguồn khi rút phích cắm. Không kéo dây nguồn. - Có thể xảy ra chập điện, cháy nổ bởi ngắn mạch.</li><li>● Rút phích cắm khỏi ổ cắm trước khi lau ghế massage, không cầm hoặc rút phích cắm bằng tay ướt.</li><li>● Khi ghế không sử dụng trong thời gian dài, hãy chắc chắn rằng phích cắm đã được rút ra khỏi ổ điện. - Bụi bẩn hoặc ẩm ướt có thể khiến bộ phận cách điện bị xuống cấp, điều đó có thể gây sốc điện hoặc cháy nổ do chập mạch.</li></ul>

## Các cảnh báo khác



Cảnh báo

 Nghiêm cấm	<ul style="list-style-type: none"><li>● Không đứng lên trên ghế. Không tác động lực mạnh hay ngồi lên bất kỳ vùng nào khác ngoài ghế ngồi. - Hành động này có thể làm bị thương hoặc tổn tại đến ghế.</li></ul>
 Không tháo rời	<ul style="list-style-type: none"><li>● Không cố gắng để sửa chữa ghế khi có lỗi xảy ra. Hãy gọi cho nhà cung cấp hoặc trung tâm bảo hành để trợ giúp.</li><li>● Để an toàn, nếu dây nguồn bị hỏng vui lòng liên hệ với nhà cung cấp - xem ở trang sau cùng - để được trợ giúp.</li><li>● Không sửa đổi hoặc sửa sang lại ghế. - Có thể xảy ra cháy nổ, điện giật hay thương tích.</li></ul>



Lưu ý

 Các yêu cầu	<ul style="list-style-type: none"><li>● Nếu bạn cho mượn, bán hay chuyển đổi ghế cho người khác, hãy chuyển cùng quyền hướng dẫn sử dụng này.</li></ul>
-----------------	---

# TÍNH NĂNG CHÍNH

## Các tính năng chính

Tích hợp và hiệu quả cao

### Tính năng mới kết hợp chương trình massage

Ghế massage được thiết kế kết hợp với hiệu quả cao cho phép con lăn xoa bóp từ vai tới vùng thắt lưng. Massage xoa bóp bằng túi khí từ hông đến từng ngón chân đồng thời cũng massage từ vai đến các đầu ngón tay.

Cảm biến quang học

### Tự động dò tìm chính xác huyết đạo

Chức năng này cho phép tự động dò tìm chính xác huyết đạo phù hợp với mọi loại hình cơ thể. Việc này sẽ giúp cho quá trình massage có hiệu quả hơn vì nó phù hợp với kích thước và hình dáng cơ thể của bạn.

Dễ dàng nhìn nhờ đèn LED

### Thiết kế bảng điều khiển thời trang

Đèn LED sẽ sáng khi bạn lựa chọn một chương trình. Các nút dễ hiểu và dễ sử dụng. Đồng thời, vùng bán nguyệt trên bảng điều khiển hiển thị LED vị trí con lăn ở vùng vai và con lăn đang hoạt động.

Dễ dàng điều chỉnh vị trí như mong muốn

### Chức năng điều chỉnh vị trí tự động

Phần lưng ghế có thể ngả bất kỳ góc nào từ 115° đến 165° so với mặt sàn. Góc ngả chân có thể điều chỉnh song song với mặt sàn.

Xoa bóp bằng túi khí

### Chương trình massage toàn bộ cơ thể bằng túi khí

Ghế massage thực hiện liệu trình massage toàn bộ cơ thể bằng túi khí từ bàn chân, bắp chân, hông, tay vai, từ vai đến từng ngón tay.

Tăng hiệu suất chỉ với 1 nút bấm

### Kết hợp các kiểu massage với cường độ mạnh nhất

Ngoài việc sử dụng các nút điều chỉnh cường độ riêng biệt như trong các model ghế massage trước đó, nút điều chỉnh cường độ **Max intensity** đã được thêm vào nhằm điều chỉnh cường độ mạnh nhất của các chương trình massage túi khí. Khi một chương trình tự động hoặc tự chọn đang hoạt động, các hoạt động massage có thể được thay đổi sang chế độ Max Intensity (mạnh nhất).

Loại bỏ hoàn toàn mệt mỏi

### Các chương trình massage đa dạng

Chương trình tự động cho phép lựa chọn một chương trình tối ưu theo mục đích của bạn. Trong khi với các chương trình tự chọn, bạn có thể kết hợp các chức năng để phù hợp với nhu cầu của bạn.

Làm ấm tay và chân

### Sưởi ấm đến từng ngón tay, ngón chân

Ghế cung cấp liệu pháp massage nhiệt đến từng ngón tay, ngón chân.


## Lợi ích

Inada là ghế massage Y tế và trị liệu cho gia đình cung cấp các lợi ích sau:

- Giải phóng hoàn toàn mệt mỏi
- Giảm căng cơ bắp
- Giảm đau cơ
- Tăng cường lưu thông tuần hoàn máu
- Giảm nhức cơ

# CẤU TẠO VÀ MÔ TẢ

## Thành phần mô tả

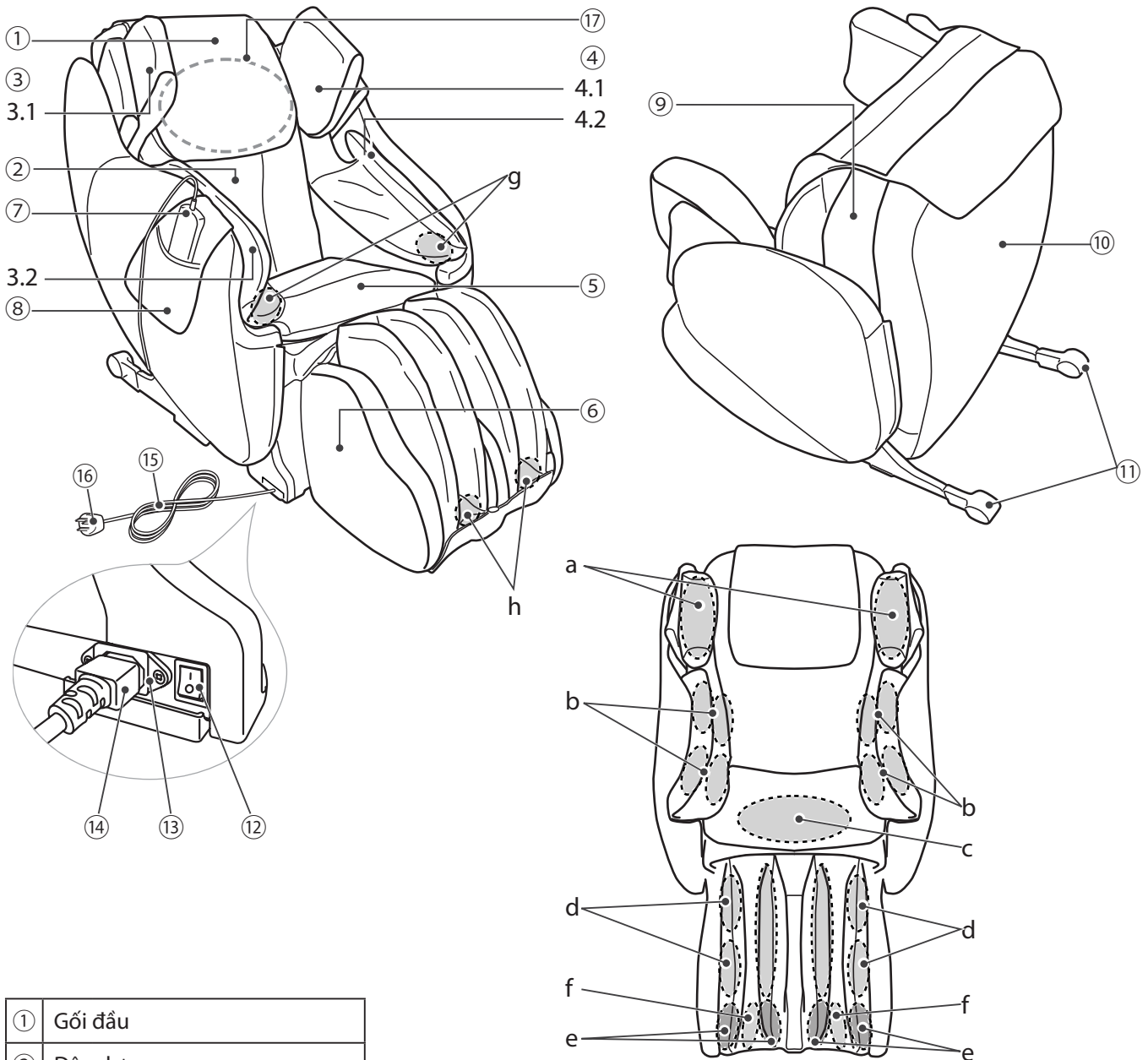


①	Gối đầu
②	Đệm lưng
③	Phần massage tay phải
• 3.1	Massage túi khí vai
• 3.2	Massage túi khí tay
④	Phần massage tay trái
• 4.1	Massage túi khí vai
• 4.2	Massage túi khí tay
⑤	Vị trí ngồi
⑥	Massage chân
⑦	Bảng điều khiển
⑧	Túi đựng bảng điều khiển

⑨	Phần lưng ghế
⑩	Tấm phủ lưng ghế
⑪	Bánh xe
⑫	Công tắc nguồn
⑬	Ổ cắm điện
⑭	Giắc cắm điện
⑮	Dây nguồn
⑯	Phích cắm
⑰	Con lăn Thường ở bên trong phần lưng ghế

a	Túi khí vai	/x 2
b	Túi khí tay	/x 8
c	Túi khí mông	/x 1
d	Túi khí bắp chân	/x 6
e	Túi khí mu bàn chân	/x 8
f	Túi khí gan bàn chân	/x 2
g	Nhiệt bàn tay	/x 2
h	Tấm nhiệt chân	/x 2




## Bảng điều khiển

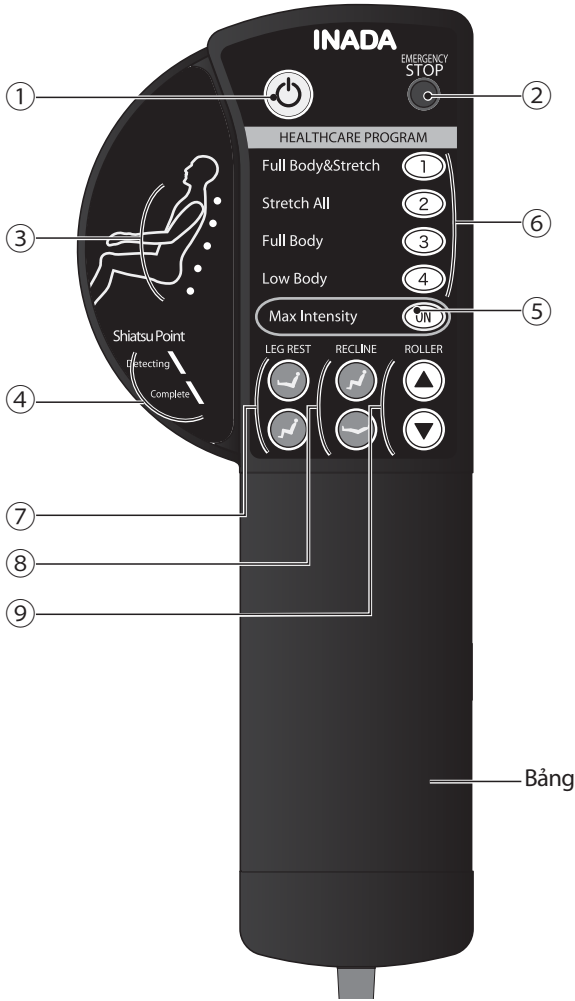

①	<b>Button</b> Nút nguồn	Ấn nút nguồn để bật tắt nguồn. Ấn nút POWER trong khi ghế đang hoạt động, con lăn sẽ chuyển về vị trí ban đầu trước khi ghế dừng hoạt động. Nút nguồn sẽ sáng đèn màu xanh khi bật, sáng đèn màu cam khi tắt và sáng đèn màu đỏ khi ghế bị dừng khẩn cấp.
②	<b>EMERGENCY STOP</b> Nút dừng khẩn cấp	Sử dụng nút dừng khẩn cấp để dừng hoạt động của ghế ngay lập tức. Trong trường hợp khẩn cấp hoặc có sự cố trong quá trình hoạt động.
③	Hiển thị vị trí con lăn	Nút mô tả vị trí của con lăn trong suốt quá trình massage.
④	<b>Shiatsu Point</b> Hiển thị tình trạng dò tìm huyết	Đèn chỉ thị sẽ sáng đỏ khi con lăn đang trong quá trình dò huyết và sáng xanh khi việc dò huyết hoàn thành.
⑤	<b>Max Intensity</b> Cường độ mạnh nhất	Lựa chọn chế độ Cường độ massage túi khí mạnh nhất.
⑥	Các chương trình tự động 1	Lựa chọn các chương trình tự động.
⑦	<b>LEG REST</b> Ngả chân	Sử dụng để điều chỉnh góc ngả chân.
⑧	<b>RECLINE</b> Ngả lưng	Sử dụng để điều chỉnh góc ngả lưng
⑨	<b>ROLLER</b> Nút điều chỉnh vị trí con lăn.	Sử dụng để điều chỉnh vị trí con lăn phân vai trong quá trình dò huyết và điều chỉnh vị trí con lăn trong chương trình massage tự chọn.

## Bảng điều khiển/bên trong bảng điều khiển

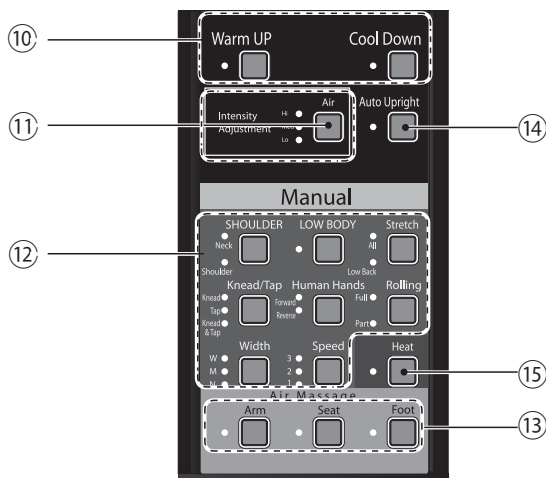

⑩	Các chương trình tự động 2	Lựa chọn các chương trình tự chọn.
⑪	<b>Intensity Adjustment</b> Điều chỉnh cường độ	Điều chỉnh cường độ áp lực túi khí.
⑫	Các chương trình tự chọn	Lựa chọn các chương trình cơ bản hoặc đặc biệt.
⑬	<b>Air Massage</b> Massage túi khí	Lựa chọn các chương trình massage túi khí: tay, lưng, chân. *Bạn có thể lựa chọn 3 chương trình massage cùng một thời điểm.
⑭	<b>Auto Upright</b> Tự động nâng ghế	Lưng ghế tự động nâng lên khi chương trình kết thúc. Bạn có thể tắt hoặc bật chế độ này.
⑮	<b>Heat</b> Nhiệt sưởi ấm tay chân	Có thể bật tắt chế độ nhiệt sưởi ấm tay, chân.

<b>⚠ Cảnh báo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Không đổ nước, chất lỏng khác vào bảng điều khiển.</li> <li>Không dùng bảng điều khiển khi tay đang ướt.</li> </ul>
<b>⚠ Lưu ý</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Không ngồi lên bảng điều khiển, không làm rơi, dẫm lên bảng điều khiển. Không kéo dây bảng điều khiển.</li> <li>Không dùng vật nhọn, cứng để tác động vào bảng điều khiển. - Việc này có thể làm hỏng bảng điều khiển.</li> </ul>

# TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

- Khi vận chuyển, sản phẩm được đóng hộp ở vị trí ngả lưng hoàn toàn. Dựng ghế về vị trí đứng thẳng khi bắt đầu sử dụng.
- Không đặt ghế ở nơi có nhiệt độ thay đổi đột ngột. Nếu đặt ghế trong phòng lạnh, hãy làm ấm từ từ. Nếu ghế được di chuyển từ nơi lạnh sang một nơi nóng, hãy đợi 1 giờ trước khi sử dụng ghế.  
- Sự ngưng tụ có thể xảy ra trong các phần chuyển động của ghế. Nó có thể làm giảm hiệu suất hoạt động.

## Cài đặt


Khoảng cách tối thiểu 50cm phía sau/trước ghế với các vật xung quanh để khi ghế ngả không gặp chướng ngại vật.



### Chú ý


- Không đặt ghế ở nơi có độ ẩm cao như trong phòng tắm hoặc phòng xông hơi.
- Chỉ lắp ghế trên sàn nhà phẳng.
- Không sử dụng ghế nơi có hàm lượng bụi cao hoặc nơi có nhiệt độ trên 40 độ C.
- Không đặt ghế ở nơi tiếp xúc trực tiếp với nhiệt như nơi có ánh nắng mặt trời trực tiếp hoặc bộ tản nhiệt.
- Tránh xa các vật có lửa như thuốc lá.

- Để tránh làm hỏng bề mặt sàn và giảm tiếng ồn của ghế, tốt nhất nên lắp ghế trên sàn nhà đã trải thảm hoặc đặt một miếng thảm lót dưới ghế. (Chú ý không sử dụng chần điện).
- Ghế massage rất nặng, do đó cần cẩn thận khi tháo lắp tránh làm hỏng bề mặt sàn nhà.
- Đặt ghế cách xa ít nhất 1m so với TV, đài và các thiết bị phát sóng radio hoặc video khác. Các thiết bị này có thể làm nhiễu sóng ảnh hưởng tới hoạt động của ghế massage.
- Tải trọng trên mỗi cm<sup>2</sup> mặt sàn xấp xỉ 2.3kg với trọng lượng 100kg của người ngồi trên ghế.

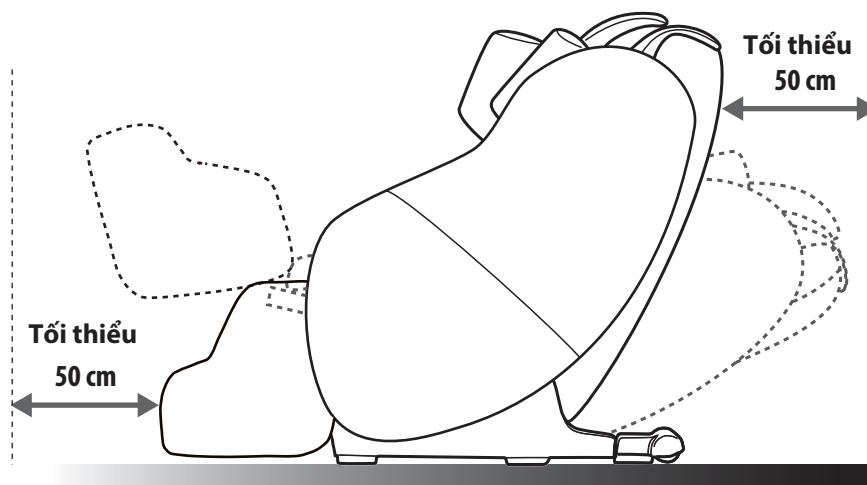

Kiểm tra ghế và các bộ phận khác.

### Ghế

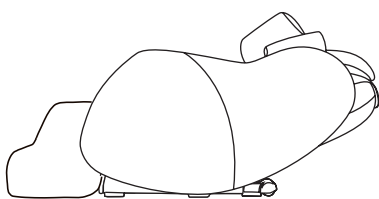

Ghế

### Phụ kiện bao gồm



Hướng dẫn sử dụng  
(Văn bản này)



Dây nguồn




Mỏ lết chữ T



Miếng trị liệu Shiatsu  
(Trái/Phải)



Tấm trị liệu Shiatsu x2

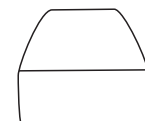

Hộp đựng bảng điều khiển



## Cách tháo và lắp đặt phần tay

Nếu hành lang di chuyển nhỏ hơn 87 cm thì khuyến nghị khi vận chuyển nên tháo rời phần tay.


- Kích thước tối thiểu bao gồm cả phần tay: Xấp xỉ 83 cm.
- Kích thước tối thiểu không bao gồm phần tay: Xấp xỉ 61 cm.

Để an toàn, trước khi tháo hoặc lắp đặt phần tay, vui lòng tắt nguồn và rút dây nguồn ra khỏi ghế.

\*Để lắp đặt lại, vui lòng làm các bước ngược lại.

Đọc các phần hướng dẫn lắp đặt một cách cẩn thận.

### ① Mở dây khóa kéo trên phần tay

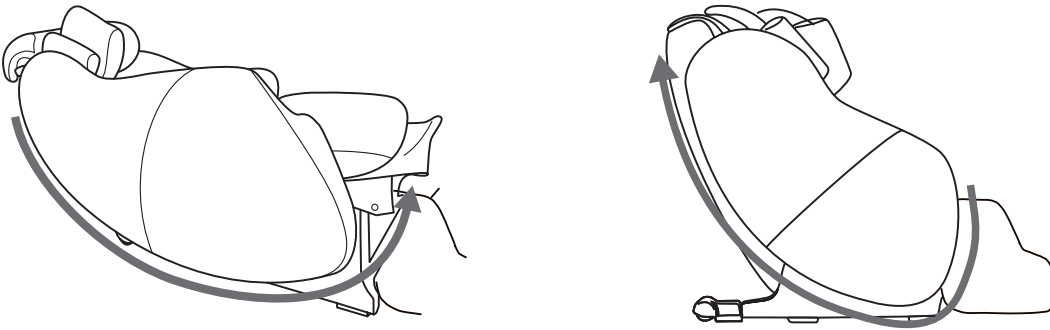

### • Lưu ý khi lắp đặt


Cắm dây nguồn vào trong ổ điện kết nối, bật nguồn và sử dụng nút điều chỉnh phần lưng để nâng ghế đến vị trí cao nhất. Sau đó kéo phần da bằng tay để làm phẳng các nếp nhăn và đóng khóa kéo.

\*Chi tiết về cách bật nguồn chính, vui lòng xem trang 10.


### ② Tháo phần ống khí và khóa van

- Cảnh báo khi lắp đặt

Phần tay trái

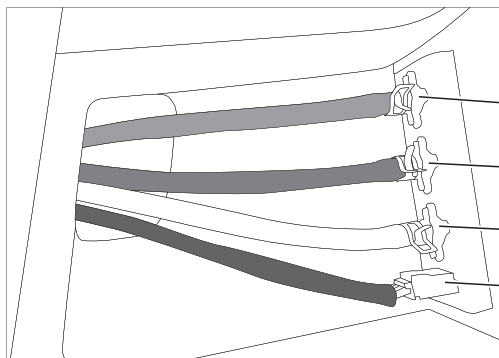

Phần tay phải

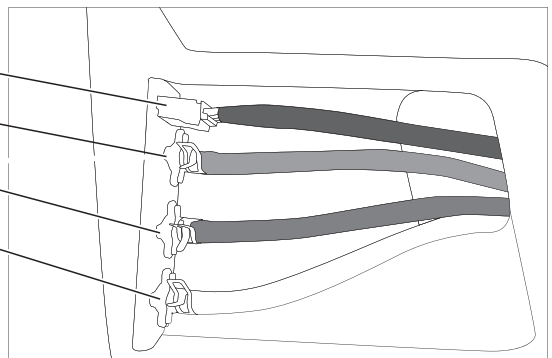


Dây điện  
Ống khí Đỏ  
Ống khí Đen  
Ống khí Trắng  
Dây điện

### ! Lưu ý

- Hãy kiểm tra kỹ việc kết nối sau khi cắm bằng cách kéo nhẹ các đầu nối để tránh bị tuột.
- Nếu việc kết nối không đúng, sẽ có lỗi xảy ra. Sau khi cắm lại, để chắc chắn hơn, bạn có thể bật nguồn để kiểm tra.

# TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

## ③ Vặn các ốc vít và vòng đệm. (3 vị trí ở mỗi bên, được thể hiện bởi các vòng tròn nét đứt)

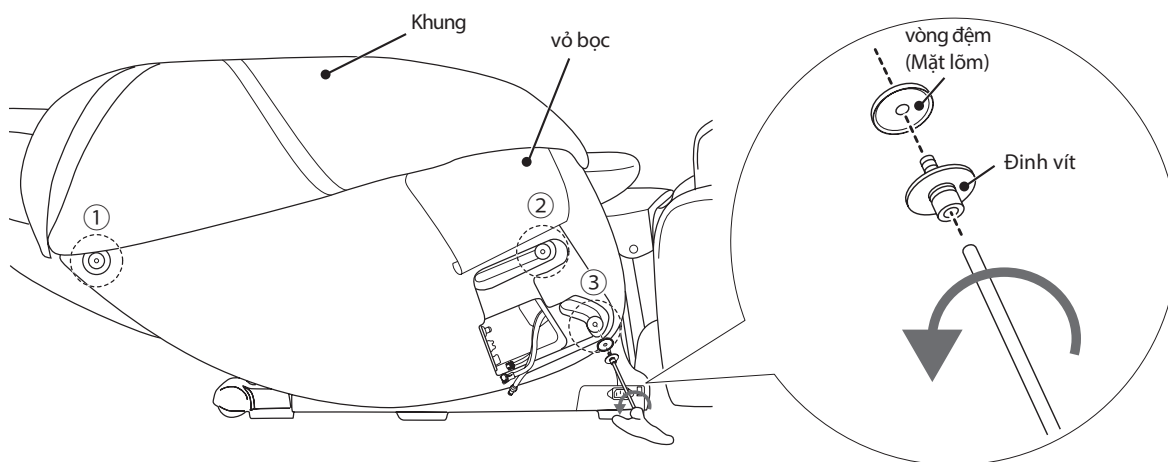


### • Lưu ý khi lắp đặt

Lắp đặt bằng mỏ lết hình chữ T theo đúng hướng vặn ở sơ đồ. (Chắc chắn rằng đã để vòng đệm đúng hướng)

Nếu các ốc vít được đặt lệch ở một góc, các đường ren có thể bị nghiền nát.

Chắc chắn rằng các ốc vít không bị đặt lệch.

## ④ Tháo phần massage tay theo thứ tự đầu tiên là a, sau đến b.

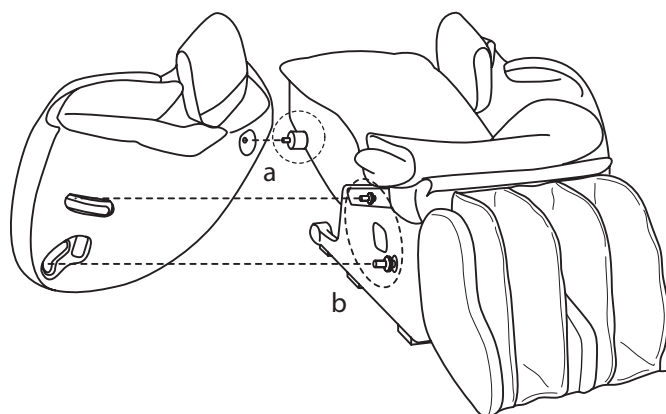

### • Lưu ý khi lắp đặt

Cắm các ống khí và khóa van thông qua lỗ hình chữ nhật ở trên phần tay ghế (4 cái ở mỗi bên)


### \*Hãy cẩn thận không sử dụng sai lỗ

Cẩn các hình dạng của các lỗ trên ghế với trên tay và chèn tay ghế massage

### \*Hãy chắc chắn rằng phần dây máy không bị chèn giữa ghế và tay vịn.



Các dây máy có thể bị hỏng.

### \*Hãy chắc chắn rằng vải ở bên trong tay ghế không bị móc bởi các trục.

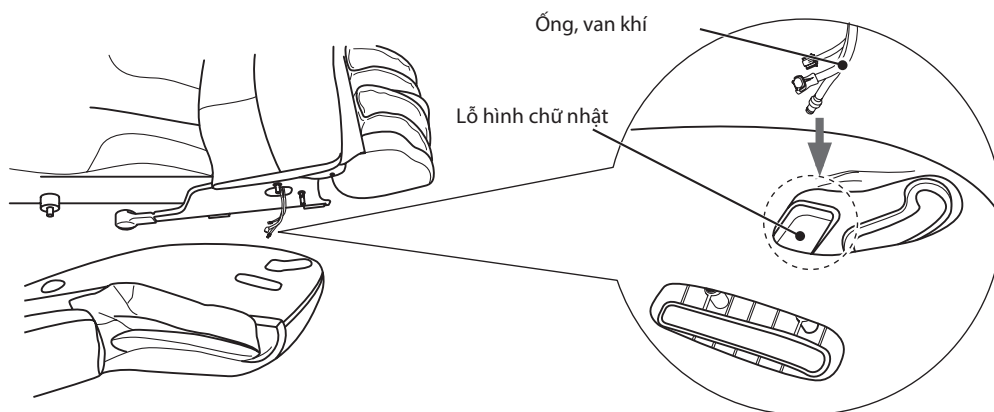

## Cách di chuyển và vận chuyển ghế

Trước khi di chuyển ghế, tắt nguồn, rút ổ cắm ra khỏi nguồn điện trên tường và rút dây nguồn ra khỏi ghế.

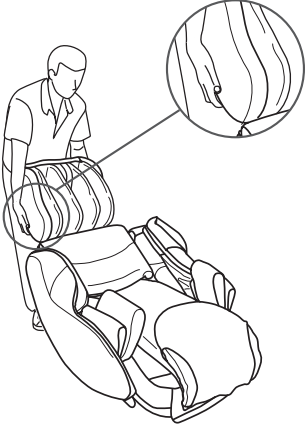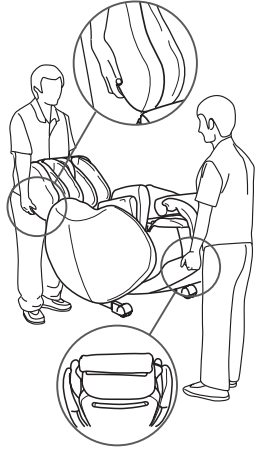Di chuyển với bánh xe	Mang vác
<p>Nâng ghế để phần lưng ghế đến vị trí thẳng đứng, giữ tay ở phần chân ghế và sau đó di chuyển ghế trên các bánh xe bằng cách nâng và giữ phần đầu của ghế.</p>	<p>Ngửa phần lưng ghế ra đằng sau và bê ghế bằng cách cầm vào phần trên của mặt sau tấm lưng ghế và các cạnh của phần chân.</p>
	


- Ghế massage rất nặng, cẩn thận để tránh bị thương phần lưng khi di chuyển và vận chuyển ghế.
- Điều khiển từ xa được gắn vào ghế, do đó hãy chắc chắn rằng nó không bị rơi khi di chuyển ghế.

<p><b>⚠️ Chú ý</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Không di chuyển ghế khi có người đang ngồi lên trên.</li> <li>● Trước khi di chuyển ghế, tắt nguồn và ngắt kết nối giữa ghế và nguồn điện cũng như tháo dây nguồn ra khỏi ghế. - Trước khi di chuyển ghế, tắt nguồn, rút ổ cắm ra khỏi nguồn điện trên tường và rút dây nguồn ra khỏi ghế.</li> </ul>
------------------------	--


**Dây nguồn có thể bị hỏng, dẫn đến cháy nổ hoặc chập điện.**

## Kết nối nguồn

- ① Đầu tiên, cắm dây nguồn vào phần ổ điện kết nối ở bên phải của ghế. Sau đó cắm phích cắm ở cuối dây nguồn vào ổ điện

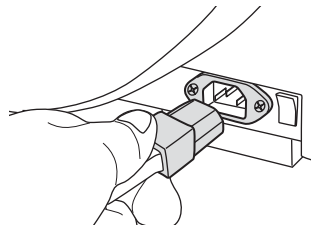

- ② Chuyển đổi nguồn ở bên cạnh phải của ghế để bật nút ON

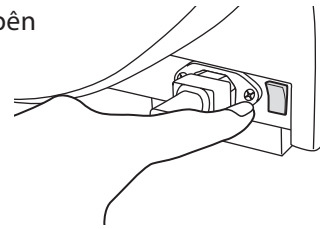

\*Nếu nguồn đã được bật sang nút ON trong khi con lăn được dừng lệnh lại ở vùng nào khác, chúng sẽ tự động chuyển về vị trí ban đầu (phía trên cùng của phần lưng ghế và sau đó sẽ dừng).


<p><b>⚠️ Cảnh báo</b></p>	<p><b>⚠️ Chú ý</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Không sử dụng với bất kì loại biến áp nào - Có thể gây ra hỏng ghế hoặc sốc điện</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Trước khi kết nối nguồn điện vào nguồn điện trên tường, hãy chắc chắn rằng nguồn đã được kết nối</li> <li>● Chắc chắn rằng phích cắm của dây nguồn đã được nối vào ổ điện.</li> <li>● Trước khi sử dụng lần đầu tiên, bật tắt cả các chế độ theo chỉ dẫn trong quyển Hướng dẫn sử dụng để kiểm tra hoạt động của ghế.</li> </ul>

# TRƯỚC KHI SỬ DỤNG


## Kiểm tra phần đệm mông

Trước khi sử dụng ghế massage, kiểm tra kĩ phần đệm lưng và đầu tránh bị rách, theo quy trình sau:

- 1 Tháo khóa dán ở phần đệm lưng

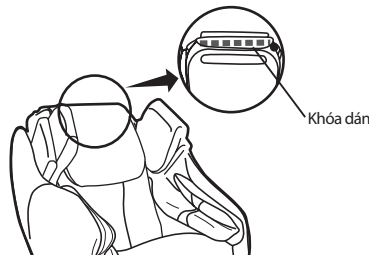

- 2 Gấp tấm đệm lưng về phía trước và kiểm tra bằng cách chạm tay của bạn vào phần vải của ghế để xem nó có bị hư hỏng hay không.

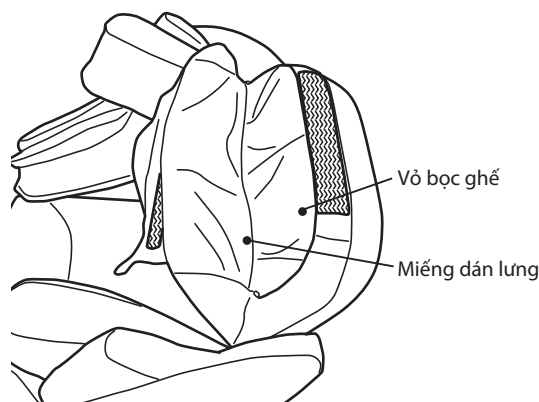


### Chú ý

- Hãy chắc chắn rằng ghế không bị rách trước khi sử dụng như thể hiện ở hình minh họa. Ngoài ra, cần kiểm tra rách với các bộ phận khác. Rút phích cắm nguồn và liên hệ ngay với các "Trung tâm bảo hành của Maxcare" (xem trang sau)
- Không sử dụng ghế massage khi vỏ bọc ghế bị rách hay có nước trên tấm phủ vì cực kì nguy hiểm.


## Cách lắp túi đựng bảng điều khiển

Gắn túi đựng bảng điều khiển vào phần tay phải của ghế như hình minh họa phía dưới.

- 1 Đặt túi đựng bảng điều khiển vào phần tay (phải).

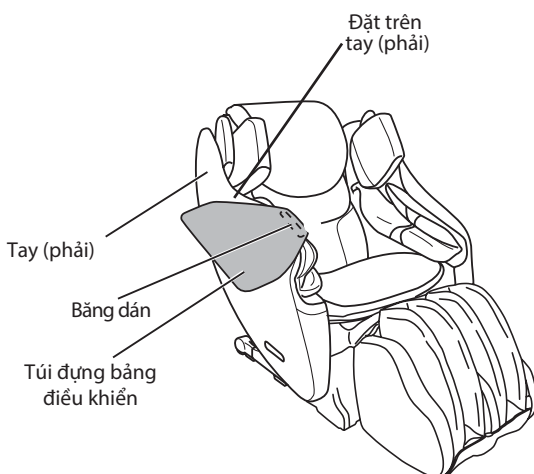

- 2 Đây là khóa dán để lắp túi đựng bảng điều khiển lên trên phần bên trong của tay (phải). Cuộn tròn túi đựng bảng điều khiển xung quanh tay (phải) để lắp.

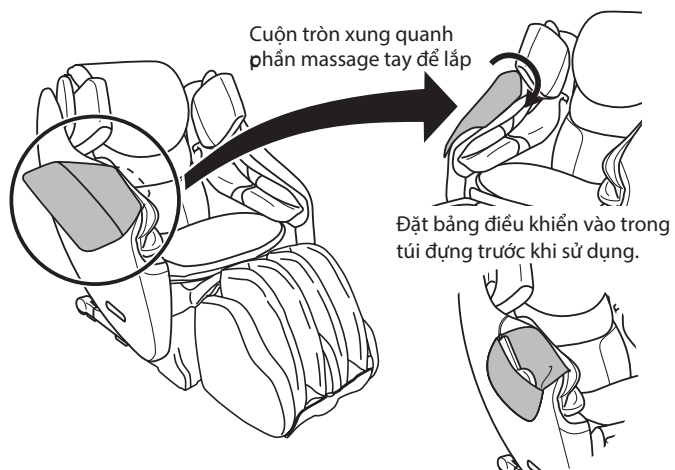

# ĐIỀU CHỈNH VỊ TRÍ

## Cách ngồi

Khi ghế massage ngừng hoạt động, các con lăn thường trở về bên trái và bên phải phần lưng ghế (vị trí lưu trữ). Để đảm bảo an toàn, đầu tiên bạn hãy kiểm tra vị trí của các con lăn. Nếu có bất kì vị trí nào khác so với vị trí lưu trữ, bạn hãy bật công tắc nguồn trước khi ngồi xuống ghế để các con lăn trở về vị trí lưu trữ. Khi bạn hoàn thành việc kiểm tra, ngồi từ từ xuống giữa phần mông của ghế.




### Chú ý

- Không ngồi lên ghế khi phần massage chân đang nâng lên
  - Bất kì tác động đột ngột nào lên phần chân khi đang được nâng có thể gây hại cho máy. Ngoài ra, có thể xảy ra tai nạn/ thương tích nếu bỏ qua lời khuyên trên
- Trước khi sử dụng, hạ phần massage chân đến vị trí đứng thẳng hoàn toàn. Sau đó ngả lưng từ từ đến vị trí bạn mong muốn, bắt đầu với một bài massage nhẹ nhàng.

## Cách sử dụng bóng Shiatsu

Các phụ kiện cho tấm trị liệu Shiatsu (mạnh, yếu) có thể được đặt ở phần chân để sử dụng. Bạn có thể sử dụng tấm trị liệu Shiatsu hay không tùy theo sở thích cá nhân.

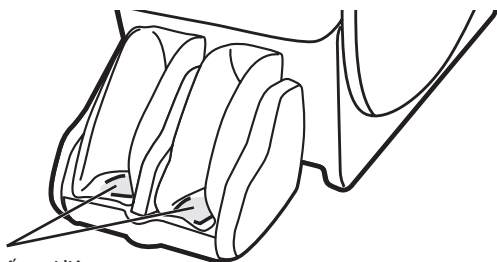


Lựa chọn tấm trị liệu Shiatsu phần chân

## Cách sử dụng phần massage tay

Đặt tay của bạn như hình minh họa bên dưới sao cho khuỷu tay của bạn ở giữa phần massage cánh tay và phần massage vai.

Nếu bạn muốn tăng cường độ massage, bạn hãy đặt miếng trị liệu Shiatsu dưới cổ tay.

- Xoay phần massage vai đến vị trí mong muốn trước khi bắt đầu massage.
- Đặt khuỷu tay giữa phần massage cánh tay và massage vai.
- Đặt lòng bàn tay hướng xuống dưới.

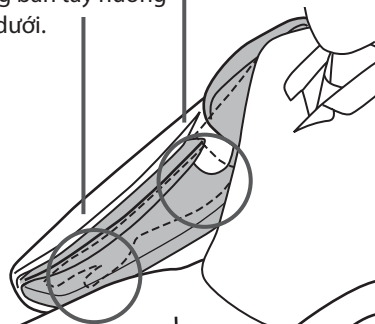

### Chú ý

Khi bạn ngồi lên hoặc đứng ra khỏi ghế, hãy chú ý đến phần massage chân đang hoạt động.



### Chú ý

- Không sử dụng phần massage cánh tay và vai cho bất cứ nơi nào khác cánh tay và vai tương ứng.
  - Nếu không, có thể dẫn tới việc bị thương.
- Nếu cánh tay của bạn rời khỏi vị trí massage phần cánh tay, đừng cố gắng dùng lực để đưa tay vào.
  - Khi tác động một lực quá lớn, có thể dẫn đến hư hỏng cho máy móc.
- Không massage khuỷu tay. Ngoài ra, phải đảm bảo rằng tay của lòng bàn tay của bạn hướng xuống dưới khi massage.
  - Nếu không có thể gây bị thương cho bạn.

# ĐIỀU CHỈNH VỊ TRÍ

## Cách ngả chân

### Điều chỉnh theo chiều dọc

LEG REST




#### Để nâng phần massage chân

Giữ nút LEG REST phía trên cùng để tăng góc ngả chân



#### Để hạ phần massage chân

Giữ nút LEG REST phía dưới cùng để giảm góc ngả chân

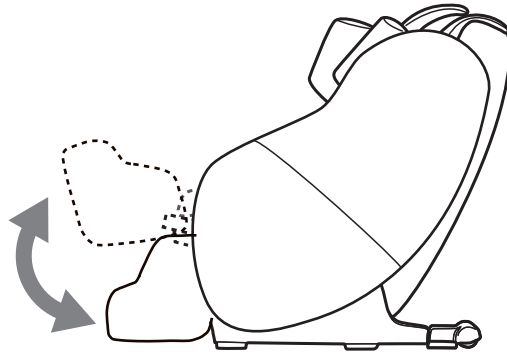



### Chức năng giữ



**Khi bạn ấn nút trong khoảng 2 giây, phần massage chân sẽ tự động nâng lên hoặc hạ xuống.**

Nếu nó dừng lại giữa quá trình hoạt động, ấn nút lần nữa.

## Mở rộng và thu hẹp phần massage chân

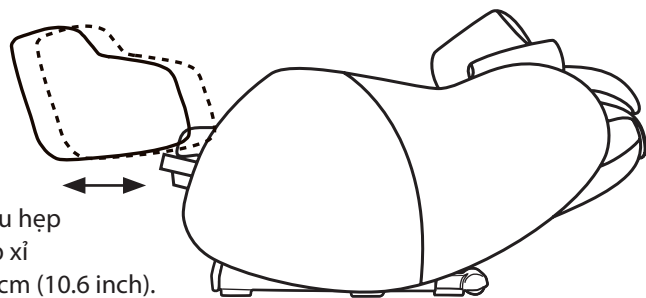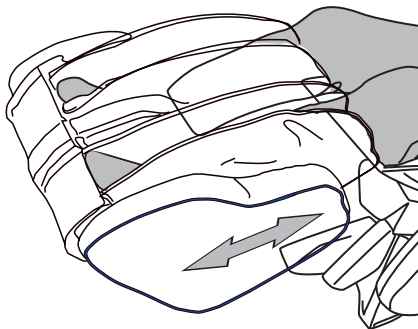Khi bạn ngồi lên ghế massage và nâng phần massage chân đến một độ cao nhất định, phần massage sẽ tự động điều chỉnh.



 <b>Cảnh báo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Đảm bảo chắc chắn rằng không có một ai, trẻ em, thú nuôi còn ở phía trong khi hạ phần massage chân. Bạn hãy kiểm tra cẩn thận phòng khi có người hoặc vật có thể ở dưới phần ngả chân.</li><li>• Không đột ngột bỏ tay ra khi đang nâng phần massage chân bằng tay.</li></ul>
 <b>Chú ý</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Không đặt bất cứ thứ gì ngoài chân và bàn chân lên phần massage chân.</li></ul>



## Hướng dẫn cách sử dụng phần ngả lưng

### Phạm vi ngả

RECLINE



- **Để tăng góc ngả lưng**


Ấn nút RECLINE ở trên cùng để tăng góc ngả lưng



- **Để giảm góc ngả lưng**

Ấn nút RECLINE ở dưới cùng để giảm góc ngả lưng

Ghế có thể ngả lên hoặc xuống kết hợp chuyển động của phần massage lưng và chân.

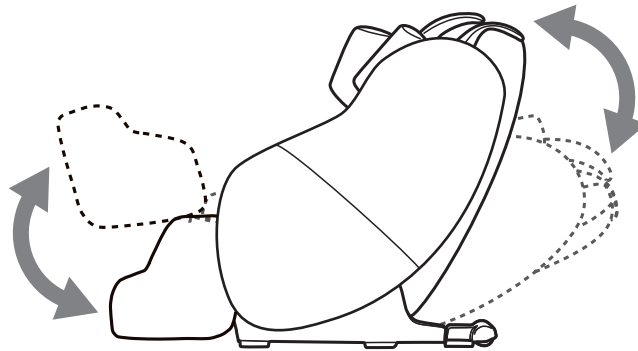

### Chức năng giữ

#### Giữ nút trong khoảng 2 giây để tự động tăng (hoặc giảm) góc ngả lưng.

Nếu nó dừng lại giữa quá trình hoạt động, ấn lại nút.

\* Phần massage lưng và chân có thể di chuyển tới vị trí tối đa và sau đó dừng lại.



#### Chú ý

- Đảm bảo rằng không có bất kỳ ai, trẻ em hoặc thú nuôi ở sau lưng ghế khi đang ngả lưng. Kiểm tra cẩn thận không để người hoặc bất kể vật gì phía sau lưng ghế.

## Cách sử dụng chức năng nhiệt sưởi ấm

Heat



Ấn nút **Heat** để bật và tắt nhiệt.

Đèn bên cạnh nút nhiệt cũng được bật.

Ấn nút để bật hoặc tắt chế độ nhiệt.

## SAU KHI SỬ DỤNG

Đảm bảo rằng, không có bất kể vật gì xung quanh khu vực lưng ghế từ vị trí ngả ghế hoàn toàn trở về vị trí dựng lên hoàn toàn và phía dưới chân ghế khu vực từ vị trí cao nhất đến vị trí ngả thấp nhất.

Tắt nguồn chính ở phía bên phải đằng trước ghế.

Rút phích cắm dây nguồn từ ổ điện trên tường. Việc này sẽ giúp tiết kiệm điện bởi vì không cần tiêu tốn điện cho chế độ chờ.



#### Chú ý

- Đảm bảo tắt nguồn chính sau khi sử dụng và rút phích điện ra khỏi ổ cắm trên tường.
  - Nếu không có thể gây tai nạn hoặc làm bị thương cho trẻ em hoặc thú nuôi nếu chúng chơi với ghế massage.
- Sau khi sử dụng ghế, phải đảm bảo phần massage lưng trở về vị trí đứng thẳng và phần massage chân trở về vị trí thấp nhất
- Lau ghế sau mỗi lần sử dụng, và bảo quản ghế ở nơi độ ẩm thấp
- Rút phích cắm dây nguồn từ ổ điện trên tường. Không kéo dây nguồn.
- Nếu ghế massage đang trong thời gian chưa sử dụng, hãy rút phích cắm dây nguồn khỏi ổ điện trên tường.
- Đảm bảo dây không bị rối, nó sẽ làm bạn gặp khó khăn khi đi qua.

# CHĂM SÓC VÀ BẢO QUẢN

## Bảo quản

- Sau khi lau sạch mọi bụi bẩn, cất trữ ghế ở nơi khô ráo.
- Nếu ghế chưa được sử dụng, phủ tấm phủ lên ghế để tránh bụi bẩn.
- Thú nuôi đôi khi có thể nhai dây điện, vì thế cố gắng giữ chúng tránh xa ghế massage ngay cả khi ghế đang được cất giữ.



### Chú ý

- Không đặt ghế massage ở nơi tiếp xúc trực tiếp với nhiệt như nơi có ánh sáng mặt trời hoặc bức xạ nhiệt.

## Chăm sóc và bảo trì



### Chú ý

- Đảm bảo rút phích điện khỏi ổ cắm điện trên tường trước khi vệ sinh ghế. Không cắm hoặc rút phích cắm khi tay ướt.

### [Chăm sóc miếng đệm lưng và da lưng]



### Chú ý

- Màu vải có thể thay đổi nếu ghế tiếp xúc với vinyl hoặc giấy dán tường trong một thời gian dài.

### [Chăm sóc bảng điều khiển]

Lau bụi bẩn bảng điều khiển bằng một miếng vải khô.

- Không sử dụng vải ẩm hoặc ướt.
  - Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến hỏng máy móc.

### [Chăm sóc các bộ phận bằng nhựa khác]

Ngâm một miếng vải mềm trong nước ấm có pha một lượng nhỏ chất tẩy rửa. Sau đó vắt kiệt nước trước khi vệ sinh bất kể điểm nào hoặc làm sạch bụi. Sau đó lau bằng vải khô để không để lại cặn của chất tẩy rửa.

- Không sử dụng cồn, các sản phẩm tẩy rửa gia dụng khác hoặc chất mài mòn bởi vì nó có thể làm xước, nứt hoặc làm cho màu mờ dần.

# CÁC CHƯƠNG TRÌNH MASSAGE

## Các chương trình tự động

Bạn có thể lựa chọn chương trình tự động phù hợp với sở thích và mục tiêu của bạn.

### Các chương trình chăm sóc sức khỏe

Các chương trình này giúp phục hồi mỏi mệt cơ bắp

#### Full Body & Stretch

Chương trình massage toàn bộ cơ thể và kéo giãn  
Chương trình này bao gồm các động tác kéo giãn nhẹ nhàng trong bài massage toàn thân.

#### Stretch All

Chương trình kéo giãn toàn bộ cơ thể  
Chương trình này bao gồm các chương trình kéo giãn nhẹ nhàng toàn bộ cơ thể.

#### Full Body

Chương trình massage toàn bộ cơ thể  
Chương trình này cần thiết cho những người đang mệt mỏi, thiếu năng lượng.

#### Low Body

Chương trình massage phần dưới cơ thể  
Chương trình này tập trung vào phần dưới cơ thể

#### Warm Up

Chương trình massage làm ấm cơ thể  
Chương trình massage nhẹ nhàng giúp thư giãn cơ bắp trước khi tập thể dục. Chương trình này cũng giúp tỉnh táo vào buổi sáng

#### Cool Down

Chương trình sử dụng sau khi chơi thể thao để thư giãn cơ bắp/kéo giãn cơ thể. Chương trình này cũng giúp loại bỏ hoàn toàn mệt mỏi, cho một ngày mới tràn đầy năng lượng


## Chương trình tự chọn

Bạn có thể kết hợp các kiểu massage khác nhau mà bạn thích. Bạn cũng có thể điều chỉnh tốc độ con lăn, cường độ khí và vị trí con lăn.

# CHƯƠNG TRÌNH TỰ ĐỘNG

## Các chương trình massage tự động

- Loại bỏ hoàn toàn mệt mỏi với 6 chương trình massage tự động cung cấp các kiểu massage khác nhau
- Với các nút trong chương trình tự động, bạn có thể chọn chương trình bạn yêu thích, các bài massage được cung cấp dựa trên chương trình tự động đã được cài đặt sẵn.

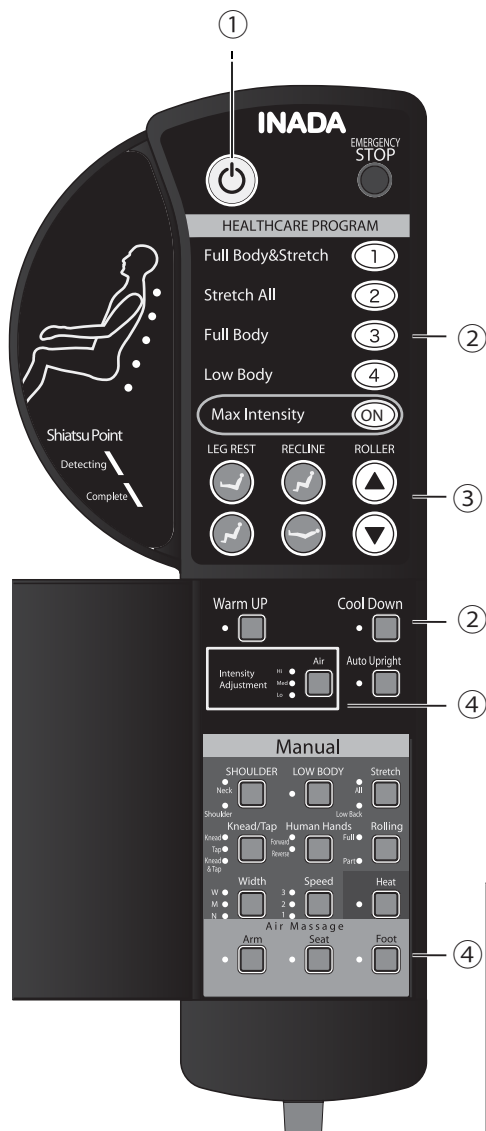

### ① Ấn nút

Nếu không lựa chọn chương trình massage nào, ghế sẽ tự động tắt nguồn trong 5 phút.

### ② Ấn nút để lựa chọn chương trình mong muốn



Ghế sẽ ngả ra trong thời gian ngắn. Sau đó, đèn chỉ thị vị trí huyết đạo sẽ sáng và việc định vị vị trí huyết đạo sẽ được thực hiện.

\*Chú ý: Ngồi tựa lưng và gối đầu lên phần massage đầu một cách thoải mái. Điểm huyết trị liệu không được định vị chính xác nếu bạn không ngồi đúng tư thế.


### ③ Vị trí huyết đạo phần vai có thể điều chỉnh

Sau khi vị trí huyết đạo được định vị, nút ROLLER sẽ nhấp nháy. Vị trí huyết đạo vai có thể điều chỉnh trong khi các nút đang nhấp nháy. Nếu không điều chỉnh thì không cần sử dụng nút này.

### Điều chỉnh vị trí huyết đạo vai

Nếu vị trí vai không đúng, điều chỉnh vị trí vai trong khi nút ROLLER đang nhấp nháy.

	▲	Các con lăn chuyển động lên trên khi ấn nút.
	▼	Các con lăn chuyển động xuống dưới khi ấn nút.

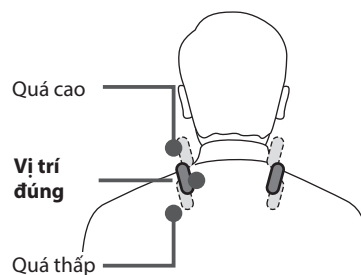


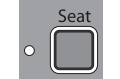
### ④ Chương trình bắt đầu



Sau kết thúc việc định vị huyết đạo, đèn Complete (hoàn thành) sẽ sáng và chương trình bắt đầu. Trong suốt quá trình massage, bạn có thể điều chỉnh cường độ massage túi khí hoặc hủy bỏ chương trình massage túi khí.

## Thay đổi chương trình

### Điều chỉnh cường độ massage và tắt chương trình massage túi khí

	<p><b>Cường độ massage túi khí có thể điều chỉnh</b>                  Mỗi lần ấn nút cường độ massage khí thì cường độ túi khí có thể được thay đổi ở mức <b>Thấp - Trung Bình - Cao</b>. Cường độ mặc định là mức trung bình.</p> <p> Ngoài ra, có thể thay đổi cường độ túi khí theo thứ tự <b>Thấp - Trung Bình - Cao</b> ngay cả khi chế độ cường độ mạnh nhất đang ON (bật). Mặc định ở chế độ cường độ massage túi khí mạnh nhất là cao.</p>
	<p><b>Bật tắt chức năng massage túi khí phần cánh tay</b>                  Cài đặt chương trình massage túi khí trong suốt quá trình massage.                  Mỗi lần ấn nút, chương trình tự động chuyển chế độ <b>ON/OFF - BẬT/ TẮT</b></p>
	<p><b>Bật tắt chức năng massage túi khí phần thắt lưng/mông</b>                  Cài đặt chương trình massage túi khí trong suốt quá trình massage.                  Mỗi lần ấn nút, chương trình tự động chuyển chế độ <b>ON/OFF - BẬT/ TẮT</b></p>
	<p><b>Bật tắt chức năng massage túi khí phần chân</b>                  Cài đặt chương trình massage túi khí trong suốt quá trình massage.                  Mỗi lần ấn nút, chương trình tự động chuyển chế độ <b>ON/OFF - BẬT/ TẮT</b></p>

### • Hoàn thành chương trình

Phần lưng ghế tự động nâng lên, các con lăn sẽ trở về vị trí lưu trữ ban đầu (Phần phía trên của lưng). Sau đó nguồn điện bảng điều khiển tắt. Tuy nhiên, lúc này phần lưng ghế và phần chân vẫn đang được điều chỉnh về vị trí ban đầu mặc dù bảng điều khiển đã tắt.

### Hủy chế độ tự động nâng ghế lên



Ở chế độ Auto Upright, lưng ghế sẽ tự động nâng lên khi chương trình hoàn thành. Bạn có thể hủy chương trình này. Đèn màu xanh sẽ sáng trong khi bạn hủy chế độ này. Nhấn nút lần nữa để bật, và phần lưng ghế sẽ nâng lên khi chương trình kết thúc.

## Thay đổi chương trình

Trước khi chương trình massage kết thúc, bạn có thể thay đổi sang chương trình khác. Sau tổng thời gian 30 phút, Chương trình sẽ dừng lại ngay khi chương trình chưa hoàn thành.

### Chuyển đổi từ chương trình tự động sang một chương trình khác


Khi lựa chọn một chương trình tự động khi một chương trình tự động khác đang hoạt động. Con lăn sẽ trở về vị trí tìm huyết ở vùng vai, và bắt đầu lại quá trình dò tìm huyết đạo trước khi massage. Các vị trí huyết đạo vùng vai có thể điều chỉnh được trong quá trình dò tìm huyết đạo vùng vai.


### Chuyển từ chương trình tự động sang chương trình tự chọn

Khi lựa chọn một chọn một chương trình tự chọn trong khi một chương trình tự động khác đang hoạt động, chương trình tự động ngay lập tức dừng lại, và chương trình tự chọn bắt đầu. Con lăn lại trở lại vị trí vùng vai, quá trình dò tìm huyết đạo bắt đầu.

(Để lựa chọn massage bằng túi khí trước tiên chọn một chương trình massage như xoa bóp và vỗ, ấn nút để dừng chương trình tự động trước khi chọn một chương trình tự chọn).

## Dừng giữa bài massage

Để dừng giữa bài massage ấn nút . Con lăn sẽ trở về vị trí lưu trữ và chương trình dừng lại.

**Trong trường hợp khẩn cấp** hoặc **có trục trặc** trong quá trình hoạt động của ghế massage, ấn nút EMERGENCY STOP. Con lăn sẽ dừng lại ngay lập tức. Sau khi đảm bảo an toàn hãy ấn nút . Con lăn massage sẽ trở lại vị trí lưu trữ và chương trình massage dừng lại.

Khi một chương trình massage tự động được lựa chọn, lưng ghế sẽ tự động ngả ra. Thêm vào đó, trong suốt tiến trình massage phần lưng ghế tự động di chuyển, vì thế trước khi sử dụng ghế massage đảm bảo chắc chắn rằng không có người hoặc vật cản phía sau, tránh trẻ em tiếp cận ghế khi đang sử dụng.



### Chú ý

- Nếu bạn cảm thấy massage quá mạnh, hãy giảm cường độ massage theo hướng dẫn sử dụng này. Nếu vấn đề không được cải thiện, dừng vận hành ngay lập tức và liên hệ với "Trung tâm bảo hành Inada" (xem trang sau) để được hỗ trợ.  
 - Có thể gây ra hư hỏng nếu bạn tiếp tục sử dụng chế độ massage mạnh.
- Không được đặt tay, hoặc chân vào các rãnh của con lăn, vào khe giữa mông và lưng hoặc bộ phận chuyển động của ghế.
- Không đeo đồ vật cứng khi sử dụng ghế massage như kẹp tóc, vòng cổ, vòng tay, đồng hồ, khuyên tai hoặc nhẫn.
- Nếu chân hoặc bàn chân của bạn ra khỏi phần massage chân, không cố gắng cho chân vào.
- Mỗi lần massage không kéo dài quá 15 phút. Không massage quá 5 phút tại một vùng massage đặc biệt của cơ thể.  
 - Tổng thời gian massage trong một ngày chỉ nên giới hạn trong 30 phút.


# CÁC CHƯƠNG TRÌNH TỰ CHỌN

## Các chương trình massage tự động


Lựa chọn các chương trình massage trong bảng điều khiển từ ① đến ④ (Hình vẽ trang 20).

- Các hình tròn trong ô điều chỉnh có ý nghĩa riêng biệt có thể được sử dụng trong quá trình massage.
- Độ rộng của con lăn chỉ điều chỉnh được khi con lăn massage ở chế độ Rolling.


### ① Các chương trình cơ bản

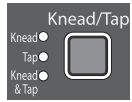Nút	Chế độ	Hoạt động	Điều chỉnh Tốc độ	Điều chỉnh Độ rộng	Điều chỉnh Lên/Xuống	Điều chỉnh Cường độ
	Xoa bóp	Thực hiện các liệu pháp massage xoa bóp	○	—	○	—
	Đấm bóp	Thực hiện các liệu pháp massage vỗ	○	○	○	—
	Xoa bóp & Đấm bóp	Xoa bóp và đấm bóp được lần lượt thực hiện	○	—	○	—

### ② Con lăn massage phần lưng

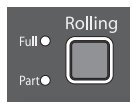
Nút	Chế độ	Hoạt động	Điều chỉnh Độ rộng	Điều chỉnh Lên/Xuống	Điều chỉnh Cường độ
	Full	Thực hiện liệu trình kéo giãn toàn bộ cột sống bằng cách thực hiện chuyển động lên và xuống	○	○	—
	Partial	Thực hiện liệu trình kéo giãn một phần cột sống bằng cách thực hiện chuyển động lên và xuống	○	○	—

### ③ Các chương trình đặc biệt

Nút	Chế độ	Hoạt động	Điều chỉnh Tốc độ	Điều chỉnh Độ rộng	Điều chỉnh Lên/Xuống	Điều chỉnh Cường độ
	Xoa bóp Lên trên	Thực hiện các liệu pháp xoa bóp phía trên phần cổ	—	—	○	—
	Xoa bóp Xuống dưới	Thực hiện các liệu pháp xoa bóp phía dưới phần cổ	—	—	○	—
	Cổ/ Vai	Thực hiện kéo giãn từ cổ đến vai	—	—	—	—
	Massage vai	Thực hiện liệu pháp massage xoa bóp ở giữa vai	—	—	—	—
	Kéo giãn Thất lưng	Thực hiện kéo giãn thắt lưng	—	—	—	—
	Uốn cong toàn bộ cơ thể	Thực hiện các động tác massage kết hợp toàn bộ cơ thể	—	—	—	○
	Điều chỉnh Tư thế đứng thẳng	Thực hiện nắn chỉnh tư thế đứng thẳng	—	—	—	○



# Bảng điều khiển

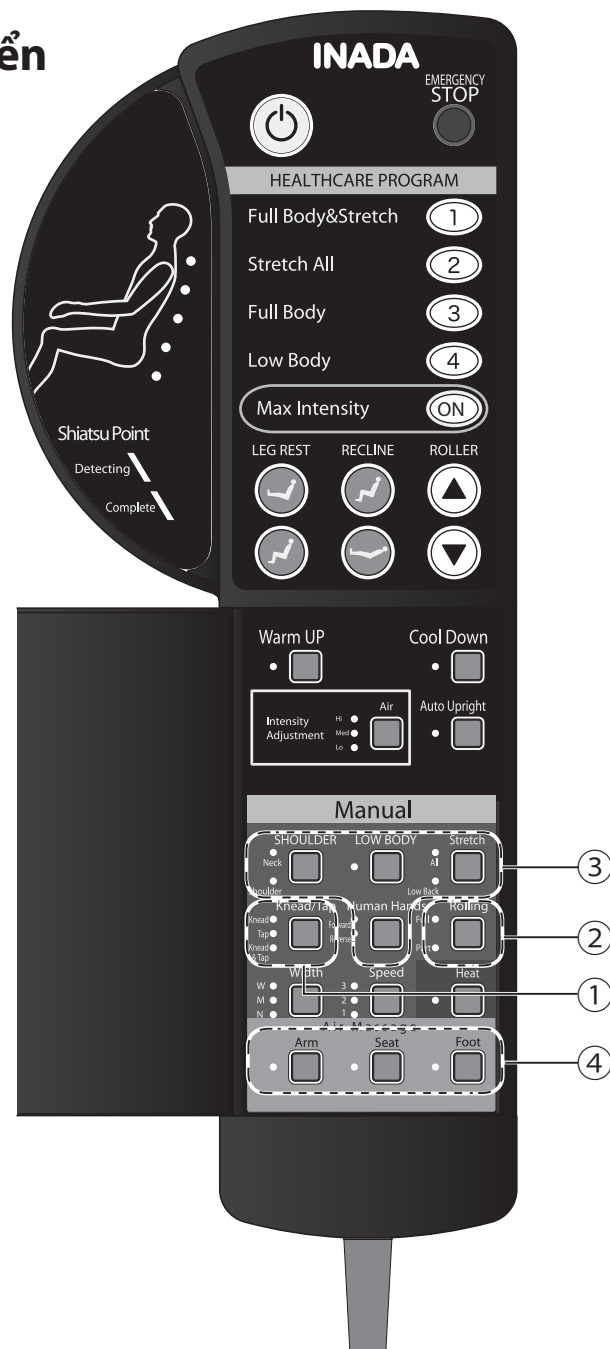


## ④ Massage bằng túi khí

Ấn các nút tương ứng với vùng bạn muốn massage

Nút	Chương trình	Hoạt động	Điều chỉnh Cường độ
	Massage tay	Massage bằng túi khí từ vai đến tận các ngón tay	0
	Massage hông	Massage bằng túi khí từ thắt lưng đến tận hông	0
	Massage chân	Massage bằng túi khí từ bắp chân đến tận ngón chân	0

# CHƯƠNG TRÌNH TỰ CHỌN

## Điều chỉnh hoạt động một điểm hoặc một vùng

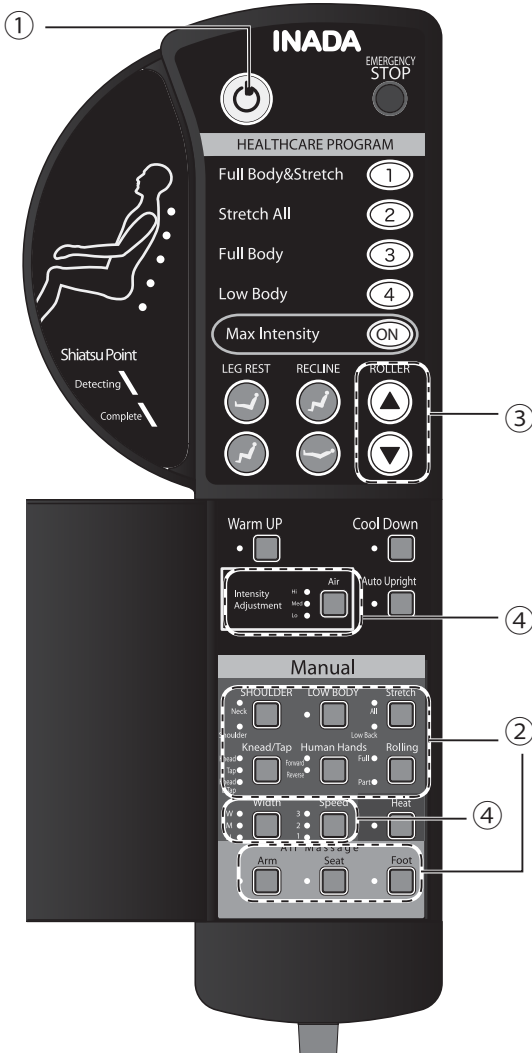

### ① Ấn nút nguồn

Nếu không chương trình nào được lựa chọn trong vòng 5 phút nguồn điện sẽ tự động tắt.

### ② Ấn nút để chọn chương trình mong muốn

Lựa chọn chương trình kết hợp massage con lăn, massage đặc biệt và massage bằng túi khí.


### ③ Vị trí vai có thể điều chỉnh được

Nếu một chương trình massage được lựa chọn, vị trí huyết đạo được định vị, nút ROLLER nhấp nháy sau khi quá trình định vị huyết đạo hoàn thành. Các vị trí vai có thể được điều chỉnh khi nút **Detecting** nhấp nháy. Nếu không điều chỉnh, không cần sử dụng nút này.



### ④ Chương trình bắt đầu

Khi một chương trình massage được lựa chọn, huyết đạo được định vị, khi chế độ này kết thúc. Đèn ở chữ COMPLETE sẽ sáng lên và chương trình sẽ bắt đầu.

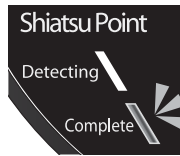

Trong chế độ tự chọn, cường độ túi khí, tốc độ con lăn có thể điều chỉnh được hoặc tắt đi ngay cả khi chương trình đang hoạt động.

### Chương trình hoàn thành

Khi chương trình massage kết thúc, con lăn di chuyển về vị trí ban đầu của nó (phía trên phần lưng ghế). Sau đó, nguồn điện bằng điều khiển tắt. Tuy nhiên, phần ngả lưng và điều chỉnh lên xuống phần massage chân có thể vẫn hoạt động.

## Điều chỉnh vị trí con lăn

	<p><b>Khi nút Rolling không được lựa chọn:</b> Vị trí con lăn có thể điều chỉnh tới các vùng mà bạn mong muốn.</p>	Khi ấn nút này thì con lăn di chuyển lên trên.
		Khi ấn nút này thì con lăn di chuyển xuống dưới.
	<p><b>Khi nút Full Rolling không được lựa chọn:</b> Có thể thay đổi giữa lên và xuống.</p>	Ấn nút để chuyển con lăn từ xuống thành lên.
		Ấn nút để chuyển con lăn từ lên thành xuống.
	<p><b>Khi nút Partial rolling được lựa chọn:</b> Vị trí trung tâm của của các con lăn có thể được điều chỉnh. Ấn và giữ nút tương ứng để con lăn di chuyển tới vị trí mong muốn thì thả tay, con lăn sẽ dừng lại.</p>	Khi ấn nút này thì con lăn di chuyển lên trên.
		Khi ấn nút này thì con lăn di chuyển xuống dưới.

- Khi lựa chọn lên hoặc xuống, con lăn đạt vị trí cao nhất hoặc thấp nhất hoặc vị trí vai nơi mà điểm trị liệu được định vị, sẽ có một âm thanh cảnh báo.



**Cảnh báo!**


Nếu không phải là hoạt động cơ bản hoặc con lăn đã được lựa chọn, sẽ không có hoạt động nào khác ngay cả khi bạn nhận nút ROLLER.

## Điều chỉnh độ rộng




Trong suốt chương trình massage cơ bản, độ rộng con lăn có thể được điều chỉnh ở 3 mức (**Hẹp, Trung bình và Rộng**).

## Điều chỉnh tốc độ

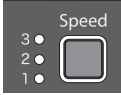

Trong suốt chương trình cơ bản, tốc độ con lăn có thể điều chỉnh được ở 3 mức (1,2,3).

## Điều chỉnh cường độ massage túi khí

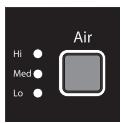

Cường độ massage túi khí có thể điều chỉnh được. Sau khi ấn nút, cường độ túi khí có thể thay đổi theo thứ tự **Thấp, Trung bình và Cao**. (Cường độ mặc định là trung bình.)

Ngoài ra, có thể thay đổi cường độ túi khí theo thứ tự **Thấp - Trung bình - Cao** ngay cả khi chế độ bổ sung cường độ mạnh nhất được bật ON. (Mặc định chế độ Cường độ mạnh nhất - Max Intensity là Cao).

## Thay đổi chương trình

### Chuyển đổi từ chương trình massage tự chọn sang chương trình tự động

Khi lựa chọn chương trình massage tự động trong khi một chương trình massage tự chọn đang hoạt động, chương trình massage tự động sẽ được thực hiện. Sau tổng thời gian 30 phút tiến trình sẽ dừng lại ngay cả khi chương trình chưa hoàn thành.

### Dừng ở giữa bài massage

Để dừng giữa bài massage, nhấn nút . Con lăn massage sẽ trở về vị trí lưu trữ và dừng lại.

Trong **trường hợp khẩn cấp hoặc nếu ghế hoạt động trực trực** trong quá trình massage, nhấn nút EMERGENCY STOP. Con lăn sẽ dừng ngay lập tức. Sau khi đảm bảo an toàn nhấn nút . Con lăn massage sẽ trở về vị trí ban đầu và dừng lại.



### Chú ý


- Nếu bạn thấy massage quá mạnh, hãy giảm cường độ theo hướng dẫn sử dụng này. Nếu vấn đề vẫn không được giải quyết, dừng vận hành ngay lập và liên lạc với "Trung tâm bảo hành và dịch vụ khách hàng" để được hỗ trợ (Xem trang sau).
  - Việc này có thể gây ra bị thương nếu bạn tiếp tục sử dụng với cường độ cao.
- Không đặt tay, hoặc chân vào các rãnh của con lăn, vào khe giữa móng và lưng hoặc bộ phận chuyển động của ghế. Không đeo đồ vật cứng khi sử dụng ghế như kẹp tóc hoặc vòng cổ, vòng tay hoặc khuyên tai hoặc nhẫn.
- Nếu chân hoặc bàn chân của bạn ra khỏi phần đế chân trong khi đang massage, không được cố đưa chân trở lại.
- Mỗi lần massage không kéo dài quá 15 phút. Không massage quá 5 phút tại một vị trí trên cơ thể.
  - Mỗi lần massage không kéo dài quá 15 phút. Không massage quá 5 phút tại một vùng hoặc một phần nào đó đặc biệt trên cơ thể. Tổng thời gian massage mỗi ngày nên là 30 phút.



### Cường độ mạnh nhất Là gì?

Chức năng này thực hiện thay đổi điều chỉnh cường độ túi khí để cường độ massage đạt mạnh nhất.


- ① **Lựa chọn Max Intensity trong suốt quá trình massage.**  
Sau khi lựa chọn chế độ Cường độ mạnh nhất, cường độ túi khí sẽ được cài đặt ở mức Cao.
- ② **Điều chỉnh độ mạnh.**  
Để điều chỉnh cường độ, ấn nút **Intensity adjustment**.

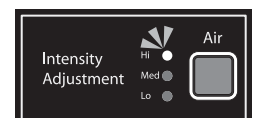

\*Chế độ này cho cường độ massage mạnh, một số người không thích nghi với chế độ này. Điều này do sở thích của mỗi cá nhân không phải là sự cố.

# XỬ LÝ SỰ CỐ

Nếu vẫn còn những vấn đề không thể xử lý theo sách hướng dẫn, dừng sử dụng ghế để tránh các tai nạn hoặc thương tích, rút dây điện khỏi nguồn điện. Liên hệ với Trung tâm sửa chữa và bảo hành của Maxcare để được trợ giúp.

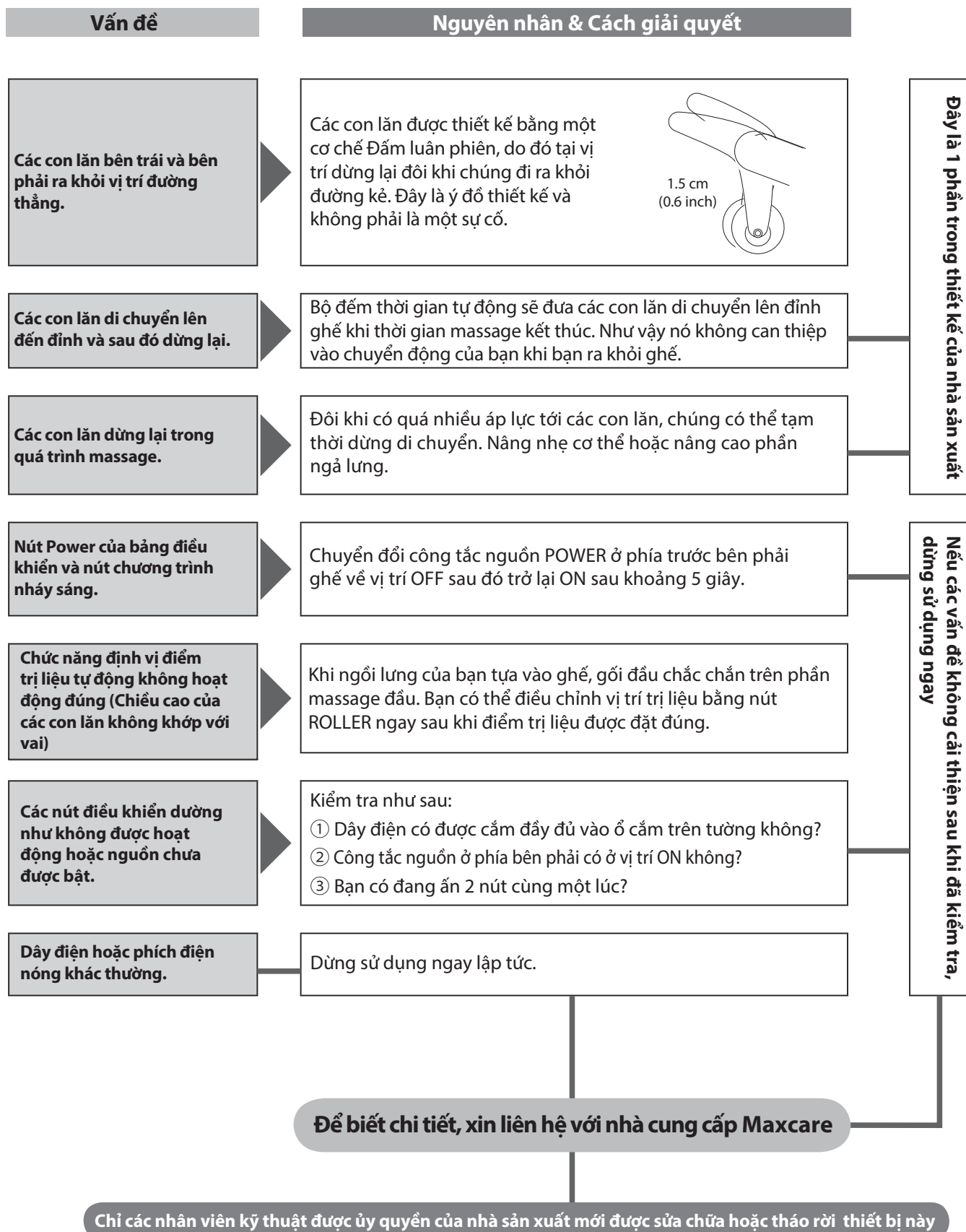

### Tiếng ồn trong quá trình sử dụng

Những tiếng ồn này là một phần hoạt động thông thường của ghế và không ảnh hưởng đến hiệu suất của ghế.

#### Các âm thanh sau đây sẽ xuất hiện trong suốt quá trình hoạt động

Âm thanh khi đấm

Âm thanh của các con lăn khi thực hiện xoa bóp

Âm thanh khi nâng/hạ các con lăn, âm thanh hoạt động của các con lăn

Âm thanh của túi khí massage

Âm thanh của bơm khí massage

Âm thanh xả khí

Âm thanh nâng/hạ lưng ghế

## BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG

### Bảo trì thường xuyên sẽ giúp kéo dài tuổi thọ của ghế massage

#### Những vấn đề thường gặp

- Khi bật nút nguồn, ghế không hoạt động.
- Dây điện bị nút hoặc trầy xước.
- Dây điện ở phần gắn phích cắm trở nên nóng bất thường.
- Ghế tạo ra mùi cháy, âm thanh bất thường hoặc rung.
- Chức năng tự động hẹn giờ không làm việc trong một số trường hợp.
- Một số trường hợp hư hỏng khác.

Nếu bạn tìm được bất kể nguyên nhân gì như liệt kê phía trên, dừng sử dụng và tháo dây nguồn để ngăn hư hỏng hoặc tai nạn. Liên hệ với nhà đầu tư hoặc "Trung tâm sửa chữa & bảo hành của Maxcare" để duy trì hoạt động.

#### Để sử dụng an toàn

Để đảm bảo sử dụng an toàn, hãy liên hệ với Trung tâm sửa chữa và bảo hành của Maxcare để được hướng dẫn trước khi kết thúc thời gian bảo hành.

\*Độ bền của ghế massage phụ thuộc vào điều kiện sử dụng.

\*Sau 5 năm sử dụng, nên kiểm tra lại toàn bộ bởi kỹ thuật viên chính hãng ngay cả khi ghế không có vấn đề gì.

Để biết phí kiểm tra, bảo dưỡng, liên hệ ngay với:

**Trung tâm sửa chữa và bảo hành của Maxcare - Hotline: 0982 449 889**

# CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

**Q** Tôi có thể đặt ghế massage lên một tấm thảm điện?

**A** Không.  
Bởi vì nó là nguyên nhân gây cháy.

Ghế massage rất nặng, vì thế nó có thể phá hỏng các phần hoạt động của thảm điện và có thể tạo ra cháy.

**Q** Làm cách nào để cho massage nhẹ hơn?

**A** Thực hiện theo chỉ dẫn sau:

- Nâng góc ngả lưng ghế.
- Đặt tấm đệm lưng vào phần massage lưng
- Bỏ tấm trị liệu và miếng trị liệu Shiatsu ra. (Khi lắp đặt)

Với các cách trên, bạn có thể tạo ra các chương trình massage nhẹ nhàng.

**Q** Tôi có thể đặt ghế trên sàn gỗ hoặc sàn nhiệt?

**A** Có.

Tuy nhiên, vì ghế massage có thể phá hủy bề mặt sàn, chúng tôi khuyên bạn nên đặt một tấm thảm hay một cái gì đó tương tự dưới ghế massage. (cũng áp dụng cho một số bề mặt sàn khác)

**Q** Tôi có thể sử dụng ghế khi tôi quá cân nặng?

**A** Chúng tôi khuyến cáo người sử dụng ghế nên có cân nặng dưới 100 kg.

Nếu bạn có cân nặng hơn 100 kg, chú ý ngồi nhẹ nhàng vào ghế massage và ngả nhẹ quá phần lưng ghế massage.

**Q** Làm sao để massage mạnh hơn?

**A** Thực hiện theo chỉ dẫn sau:

- Ngồi sâu vào phía trong ghế, trọng lực của bạn sẽ được đặt nhiều hơn vào phần lưng ghế.
- Hạ thấp phần lưng ghế massage.
- Tháo bỏ các miếng đệm ở phần lưng ghế.

Với các bước trên bạn có thể tăng cường độ massage.

**Q** Có thể dừng nâng lưng ghế khi một chương trình hoàn thành?

**A** Có.

Bạn có thể tự động dừng hoạt động nâng lưng ghế khi chương trình hoàn thành khi ấn nút "Auto Upright".



**Q** Người có chiều cao dưới 150 cm (5 feet) hoặc trên 180 cm (6 feet) có thể sử dụng ghế?

**A** Có.

Bởi vì vị trí chính xác của vai có thể không được tìm ra trong suốt quá trình dò tìm huyết vị, có thể sử dụng ghế theo các gợi ý sau:

- Người thấp: nâng phần lưng ghế massage lên.
- Người cao: ngả phần lưng ghế massage ra.
- Sau khi thực hiện việc dò tìm huyết đạo, điều chỉnh vị trí vai.

**Q** Tôi làm rơi nước vào ghế massage Tôi nên làm thế nào?


**A** Có thể xảy ra chập điện nguy hiểm. Dừng hoạt động ghế ngay lập tức và thao tác theo các bước sau.

- Tắt nút nguồn ở phía sau ghế massage.
- Rút phích cắm điện ra khỏi nguồn điện
- Sau khi thực hiện các bước trên, hãy liên hệ với nhà phân phối để được hỗ trợ.


**Q** Nắp bảng điều khiển bị rơi ra. Tôi có thể lắp nó lại?

**A** Lắp lại theo hướng dẫn dưới đây:

- Giữ bảng điều khiển như minh họa, và chèn lẫy ở dưới phía bên phải nắp bảng điều khiển vào lỗ trên bảng điều khiển.

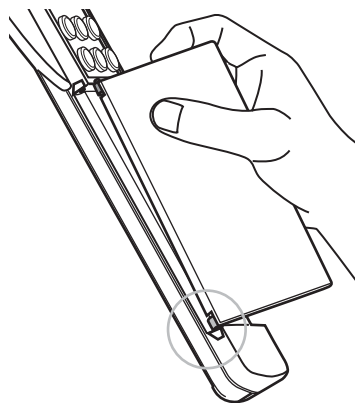

- Nhẹ nhàng đẩy nắp bảng điều khiển theo hướng mũi tên và chèn lẫy phía trên bên trái của nắp bảng điều khiển vào lỗ trên bảng điều khiển.

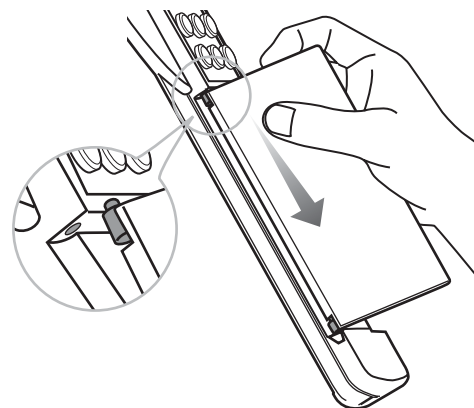

# THÔNG SỐ KỸ THUẬT

<b>Model</b>	HCP-S878D	
<b>Điện áp nguồn</b>	220-240V~	
<b>Công suất tiêu thụ</b>	160W	
<b>Tần số</b>	50-60Hz	
<b>Thời gian tối đa/lần sử dụng</b>	30 phút	
<b>Phía trên cơ thể</b>	<b>Tốc độ xoa bóp</b>	3 mức độ, tối thiểu 6 lần/phút đến tối đa 18 lần/phút.
	<b>Tốc độ đấm bóp</b>	3 mức độ, tối thiểu 178 lần/phút đến tối đa 331 lần/phút.
	<b>Độ rộng con lăn</b>	3 mức độ (hẹp, trung bình, rộng)
	<b>Tăng/ Giảm tốc độ</b>	Một chu trình đầy đủ khoảng 26 giây (tối thiểu khoảng 2.1 cm/giây, tối đa khoảng 3.8 cm/giây)
	<b>Giải massage phần lưng</b>	Khoảng 69 cm (trong chế độ massage một phần: khoảng 15 cm)
<b>Chương trình tự động</b>	Các chương trình chăm sóc sức khỏe: 6 chương trình	
<b>Chương trình tự chọn</b>	16 kiểu massage (Tự động định vị huyết đạo được bao gồm trong một số bài)	
<b>Áp lực túi khí</b>	Khoảng 37 kPa	
<b>Thời gian tự động</b>	Khoảng 15 phút (Các chương trình tự động có sự khác nhau về thời gian)	
<b>Khoảng điều chỉnh phần chân</b>	Khoảng 7 cm	
<b>Góc ngả</b>	Khoảng 115°- 165°	
<b>Kích thước ghế</b>	Khoảng 83 × 135 (163) × 100 (70) cm (Rộng/Dài/Cao) Các thông số chiều dài và chiều cao đại diện cho kích thước khi ngả hoàn toàn phần lưng và phần massage chân duỗi thẳng.	
<b>Trọng lượng</b>	Khoảng 76 kg (168 lb)	
<b>Vỏ bọc</b>	Da tổng hợp cao cấp kháng khuẩn	
<b>Các phụ kiện kèm theo</b>	Dây nguồn; Miếng trị liệu Shiatsu chân(Trái/Phải); Tấm trị liệu Shiatsu; Bao đựng bảng điều khiển; Mỏ lết chữ T	